



Anlegen der L300 Go-Manschette für funktionelle Stimulation

- 1 Unterschenkel im Sitzen leicht ausstrecken.
- 2 Oberteil der L300 Go-Manschette in Ihre Richtung kippen und am Bein hochschieben, bis die Positionierungshilfe unter der Kniescheibe sitzt, dann unteren Rand der L300 Go-Manschette auf das Bein absenken.
- 3 Die L300 Go-Manschette dabei mit dem Daumen oder der anderen Hand auf der Stimulatorhalterung festhalten. Orthosenlasche über die Halterung ziehen.
- 4 Abbildung 4 zeigt die korrekt platzierte L300 Go-Manschette am rechten Bein.

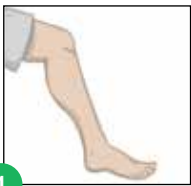

1

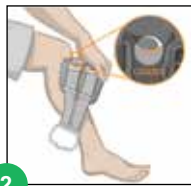

2









3



4

Bedienung des L300 Go-Systems



- 1  Ein/Aus-Taste am Stimulator drücken.
- 2 Gang- oder Trainings-Modus auswählen:
 - Zur Auswahl des Gang-Modus *kurz* die  Modustaste drücken.
 - Zur Auswahl des Trainings-Modus die  Modustaste 3 Sekunden *gedrückt halten*. Der Stimulator bestätigt die Modusauswahl durch einen Signalton und Vibration. Zur Beendigung des Trainings-Modus die  Modustaste 3 Sekunden gedrückt halten.
- 3 Die Stimulationsintensität kann bei Bedarf durch Drücken der  Plus- oder  Minustaste geändert werden.

Aufladen der Akkus

Das Systemladegerät an den Stimulator anschließen und den Netzstecker in eine Steckdose stecken.



	Stimulator-Status-Anzeigeleiste blinkt rot und Akku-Anzeigeleuchte blinkt gelb	Stimulator-Akku bald leer
	Blinkt gelb	Akku bald leer
	Blinkt grün	Aufladung
	Leuchtet grün	Voll aufgeladen

Anzeigen des Stimulators



	Blinkt grün	System eingeschaltet
	Blinkt grün	Stimulation ausgeschaltet
	Blinkt gelb	Stimulation eingeschaltet
	Blinkt rot mit Alarmton	Fehler liegt vor
	Leuchtet rot	Fehler beim Stimulator

Anzeigen der Steuereinheit*



	Leuchtet	System eingeschaltet
	Stimulationswelle sichtbar	System im Gang-/Trainings-Modus, Stimulation aktiviert, aber ausgeschaltet
	Stimulationswelle blinkt	System im Gang-/Trainings-Modus, Stimulation aktiviert und eingeschaltet
	Anzeige 0–9	Intensitätsstufe
	Gang-Symbol angezeigt	Gang-Modus ist aktiviert
	Trainings-Symbol angezeigt	Trainings-Modus ist aktiviert
	Lautsprecher-Symbol angezeigt	Ton ist eingeschaltet

* Optionale Komponente

Anzeige von Systemfehlern

	Kein korrekter Elektrodenkontakt. Elektroden müssen eingerastet sein und der Stimulator muss fest in der Halterung sitzen. Fehlermeldung durch Drücken von oder auf dem Stimulator löschen.	
	Anzeige für niedrigen Akkuladestand auf dem Stimulator. System muss aufgeladen werden.	
		Fehler beim Stimulator. Taste 30 Sekunden gedrückt halten, dann einschalten oder technischen Support kontaktieren.

Die vollständigen Kontraindikationen, Warnhinweise, Nebenwirkungen, Vorsichtsmaßnahmen und Pflegeanweisungen sind im Anwenderhandbuch aufgeführt.

© 2022 Bioness Inc.

L300 Go®, Bioness, das Bioness-Logo® und LiveOn® sind Marken der Bioness Inc in den USA oder anderen Ländern. | www.bioness.com