


De L300 Go-manchet voor functionele stimulatie omdoen

- 1 Strek terwijl u zit uw onderbeen enigszins uit.
- 2 Kantel de bovenkant van de L300 Go-manchet naar u toe en schuif de manchet op uw been omhoog totdat de locator onder de patella zit. Laat de onderkant van de L300 Go-manchet op uw been zakken.
- 3 Houd de L300 Go-manchet op zijn plek met uw duim of met uw andere hand op de EPG-houder. Trek het bandhandvat om de drager heen.
- 4 Afbeelding 4 toont de L300 Go-manchet op de juiste wijze geplaatst op het rechterbeen.



1

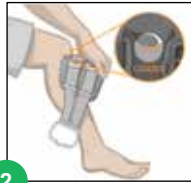

2




3



4

Het L300 Go-systeem bedienen



- 1 Druk op de aan/uit-knop  om de EPG in te schakelen.
- 2 Selecteer de loop- of trainingsmodus:
 - Om de loopmodus te selecteren, drukt u *kortstondig* op de modusknop .
 - Om de trainingsmodus te selecteren, houdt u de modusknop  3 seconden *ingedrukt*. De EPG bevestigt de nieuwe modus met audio- en vibratiefeedback. U verlaat de trainingsmodus door de modusknop  3 seconden ingedrukt te houden.
- 3 Stel zo nodig het intensiteitsniveau van de stimulatie af door op de plusknop  of minknop  te drukken.

De batterijen opladen

Sluit de systeemopladerset aan op de EPG en op een stopcontact.



	De EPG-statusindicatorbalk knippert geel en de batterij-indicatorlamp knippert geel	EPG-batterij bijna leeg
	Knippert geel	Batterij bijna leeg
	Knippert groen	Opladen
	Brandt groen	Volledig opgeladen

EPG-lampje



	Knippert groen	Systeem is aan
	Knippert groen	Stimulatie is uit
	Knippert geel	Stimulatie staat aan
	Knippert rood met hoorbaar alarm	Actieve fout
	Brandt rood	EPG werkt niet

Bedieningsunitweergaven*



	Constant	Systeem is aan
	Stimulatiegolf zichtbaar	Systeem is in loop/training, stimulatie is ingeschakeld maar uit
	Stimulatiegolf knippert	Systeem is in loop/training, stimulatie is ingeschakeld en aan
	Geeft 0–9 weer	Intensiteitsniveau
	Geeft looppictogram weer	Loopmodus is ingeschakeld
	Geeft trainingspictogram weer	Trainingmodus is ingeschakeld
	Geeft audiopictogram weer	Audio staat aan

*Optioneel onderdeel

Systemfoutweergaven

	Gebrekkig elektrodecontact. Zorg dat de elektroden goed vastzitten, EPG volledig in houder. Wis foutmelding door op of op EPG te drukken.	
	Indicator voor lage batterij op EPG. Laad het systeem op.	EPG werkt niet. Houd de knop 30 seconden ingedrukt, moet dan inschakelen of bel Technische ondersteuning.

Voor een volledige lijst van alle contra-indicaties, bijwerkingen, voorzorgsmaatregelen en zorginstructies raadpleegt u de gebruikershandleiding.

©2022 Bioness Inc.

L300 Go®, Bioness, het Bioness Logo® en LiveOn® zijn handelsmerken van Bioness Inc. in de Verenigde Staten of andere landen. | www.bioness.com