

## Come indossare il cosciale di stimolazione funzionale L300 Go

- 1 Da seduti, allungare leggermente la parte inferiore della gamba.
- 2 Inclinare la parte superiore del cosciale L300 Go verso di sé e farla scorrere sulla gamba fino a posizionare il localizzatore sotto la rotula. Abbassare la parte inferiore del cosciale L300 Go sulla gamba.
- 3 Tenere il cosciale L300 Go in posizione con il pollice o con l'altra mano sulla base dell'EPG. Trascinare l'impugnatura della fascia intorno alla base.
- 4 La Figura 4 mostra il cosciale L300 Go correttamente posizionato sulla gamba destra.



1



2









3



4

## Funzionamento del sistema L300 Go



- 1 Premere il pulsante di accensione/spegnimento  per accendere l'EPG.
- 2 Selezionare la modalità deambulazione o riabilitazione:
  - Per selezionare la modalità deambulazione, premere brevemente il pulsante .
  - Per selezionare la modalità riabilitazione, premere e tenere premuto il pulsante  della modalità per 5 secondi.  
L'EPG confermerà la nuova modalità con una segnalazione acustica/tattile. Per uscire dalla modalità riabilitazione, premere e tenere premuto il pulsante  della modalità per 10 secondi.
- 3 Se necessario, regolare il livello di intensità della stimolazione premendo il pulsante  più o  meno.



## Carica delle batterie

Collegare il set caricabatteria all'EPG e inserire la spina nella presa a parete.



(lampeggiante)	La barra dell'indicatore di stato dell'EPG è rosso lampeggiante mentre l'indicatore luminoso della batteria è giallo lampeggiante	Batteria dell'EPG scarica
(lampeggiante)	Giallo lampeggiante	Batteria scarica
(lampeggiante)	Verde lampeggiante	In carica
(fisso)	Verde fisso	Carica completa

## Segnalazioni dell'EPG



(lampeggiante)	Verde lampeggiante	Il sistema è acceso
(lampeggiante)	Verde lampeggiante	La stimolazione non è attiva
(lampeggiante)	Giallo lampeggiante	La stimolazione è attiva
(lampeggiante)	Rosso lampeggiante con allarme sonoro	Errore attivo
(fisso)	Rosso fisso	Malfunzionamento dell'EPG

## Indicazioni dell'unità di controllo\*



	Fisso	Il sistema è acceso
	Onda di stimolazione visibile	Il sistema è in Deambulazione/Riabilitazione, la stimolazione è abilitata ma non è attiva
	Onda di stimolazione lampeggiante	Il sistema è in Deambulazione/Riabilitazione, la stimolazione è abilitata ed è attiva
	Visualizza 0-9	Livello d'intensità
	Visualizza icona di deambulazione	La modalità deambulazione è abilitata
	Visualizza icona di riabilitazione	La modalità riabilitazione è abilitata
	Visualizza icona dell'audio	L'audio è attivo

\*Componenti opzionali

## Icone di errore del sistema

(lampeggiante)	Contatto elettrodo difettoso. Verificare che gli elettrodi siano ben collegati e che l'EPG sia completamente inserito nella base. Cancellare l'avviso di errore premendo  o  sull'EPG	
(lampeggiante)	Indicatore batteria scarica sull'EPG. Caricare il sistema.	(fisso) Malfunzionamento dell'EPG. Premere e tenere premuto il pulsante  per 30 secondi, poi accendere o contattare l'assistenza tecnica

Per l'elenco completo di tutte le controindicazioni, avvertenze, reazioni avverse, precauzioni e istruzioni per la cura, vedere la Guida per l'utilizzatore.

©2022 Bioness Inc.

L300 Go®, Bioness, il logo Bioness® e LiveOn® sono marchi commerciali di Bioness Inc. negli Stati Uniti d'America o in altri Paesi. | [www.bioness.com](http://www.bioness.com)