

Ta på L300 Go FS-mansjetten (FS, Functional Stimulation)

- 1 Sitt vanlig, og strekk leggen litt ut.
- 2 Vipp toppen av L300 Go-mansjetten mot deg og skyv den oppover leggen inntil lokatoren sitter på plass under kneskålen. Senk nedre del av L300 Go-mansjetten ned på leggen.
- 3 Hold L300 Go-mansjetten på plass med tommelen eller den andre hånden på EPG-holderen. Trekk strophåndtaket rundt holderen.
- 4 Figur 4 viser L300 Go-mansjetten korrekt plassert på høyre bein.



1



2









3



4

Bruke L300 Go-systemet







- 1 Trykk på av/på-knappen  for å slå på EPG-en.
- 2 Velg enten gange- eller treningsmodus:
 - Hvis du vil velge gangemodus, trykker du på modusknappen  et kort øyeblikk.
 - Hvis du vil velge treningsmodus, trykker du på og holder inne modusknappen  i 3 sekunder. EPG vil anerkjenne den nye modusen med lyd- og berøringstilbakemelding.
 - Hvis du vil avslutte treningsmodus, trykker du på og holder inne modusknappen  i 3 sekunder.
- 3 Ved behov justerer du stimuleringens intensitetsnivå ved å trykke på  pluss- eller  minus-knappen.

Lade batteriene

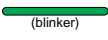
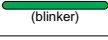
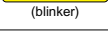
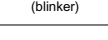

Koble systemladersettet til EPG-en, og koble til en stikkontakt.



 (blinker)	EPG-statusindikatorlinjen blinker rødt samtidig som batteriindikatorlampen blinker gult	Lavt EPG-batterinivå
 (blinker)	Blinker gult	Svakt batteri
 (blinker)	Blinker grønt	Lader
	Kontinuerlig grønt	Fullt oppladet

EPG-displayer










 (blinker)	Blinker grønt	Systemet er på
 (blinker)	Blinker grønt	Stimulering er av
 (blinker)	Blinker gult	Stimulering er på
 (blinker)	Blinker rødt med lydalarm	Aktiv feil
	Kontinuerlig rødt	EPG-funksjonsfeil

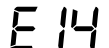





Kontrollenhetsvisninger*



*Tilleggsutstyr

	Kontinuerlig	Systemet er på
	Stimuleringsbølge synlig	Systemet er i gange/trening, stimulering er aktivert, men av
	Stimuleringsbølge blinker	Systemet er i gange/trening, stimulering er aktivert og på
	Viser 0–9	Intensitetsnivå
	Viser ikonet Gange	Gangemodus er aktivert
	Viser ikonet Trening	Treningsmodus er aktivert
	Viser ikonet Lyd	Lyd er på

Systemfeilvisninger

 (blinker)	Defekt elektrodekontakt. Kontroller at elektroder er festet, EPG-en sitter i holderen. Fjern feilvarselet ved å trykke på  eller  på EPG-en.
 (blinker)	Indikator for lavt batterinivå på EPG-en. Lad systemet.
	EPG-funksjonsfeil. Trykk på og hold inne knappen  i 30 sekunder, og slå på, eller ring teknisk støtte.

En fullstendig liste over alle kontraindikasjoner, advarsler, bivirkninger, forholdsregler og forsiktighetsanvisninger finnes i brukerhåndboken.

©2022 Bioness Inc.

L300 Go®, Bioness, Bioness-logoen® og LiveOn® er varemerker for Bioness Inc. i USA eller andre land. | www.bioness.com