

## Надевание манжеты для функциональной стимуляции L300 Go

- 1 В положении сидя слегка вытяните голень.
- 2 Наклоните верхнюю часть манжеты для L300 Go к себе и наденьте манжету на ногу таким образом, чтобы ограничитель располагался под коленной чашечкой. Опустите нижнюю часть манжеты L300 Go на ногу.
- 3 Удерживайте манжету L300 Go на месте большим пальцем или свободной рукой за базу EPG. Оберните базу ремешком.
- 4 На рисунке 4 показана манжета для L300 Go, правильно надетая на правую ногу.



1



2









3



4

## Эксплуатация системы L300 Go



- 1 Нажмите кнопку  ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы включить EPG.
- 2 Выберите режим ходьбы или упражнения:
  - Чтобы выбрать режим ходьбы, кнопку  нажмите и отпустите.
  - Чтобы выбрать режим упражнения, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд. EPG подтвердит новый режим звуковым и тактильным сигналом обратной связи. Чтобы выйти из режима упражнения, нажмите и удерживайте  кнопку режима в течение 3 секунд.
- 3 При необходимости отрегулируйте уровень интенсивности стимуляции при помощи кнопок  «плюс» или  «минус».



**Bioness Inc.**  
 25103 Rye Canyon Loop  
 Valencia, CA 91355, USA (США)  
 Тел.: 800-211-9136  
 Адрес эл. почты: [info@bioness.com](mailto:info@bioness.com)  
 Сайт: [www.bioness.com](http://www.bioness.com)



**bioness**<sup>®</sup>

A Bioventus Rehab Company

612-00895-001 Rev. C  
 12/2022

## Зарядка аккумуляторов

Подключите зарядное устройство системы к EPG, затем вставьте вилку в настенную розетку.



	Полоса световых индикаторов состояния EPG мигает красным, а световой индикатор аккумулятора — желтым	Низкий заряд EPG
	Мигает желтым	Низкий заряд аккумулятора
	Мигает зеленым	Зарядка
	Горит зеленым	Полностью заряжена

## Индикаторы EPG



	Мигает зеленым	Система включена
	Мигает зеленым	Стимуляция отключена
	Мигает желтым	Стимуляция включена
	Мигает красным и сопровождается звуковым сигналом	Активная ошибка
	Горит красным	Неисправность EPG

## Индикаторы блока управления\*



\* Опциональный компонент

	Горит	Система включена
	Отображается значок «Волна стим-и»	Система находится в режиме ходьбы или упражнения; стимуляция включена, но не выполняется
	Значок «Волна стим-и» мигает	Система находится в режиме ходьбы или упражнения; стимуляция включена и выполняется
	Цифры 0–9	Уровень интенсивности
	Отображается значок «Ходьба»	Включен режим ходьбы
	Отображается значок «Упражнение»	Включен режим упражнений
	Отображается значок «Звук»	Звуковая сигнализация включена

## Индикаторы системных ошибок

	Плохой контакт электрода. Проверьте, что электроды на месте и EPG полностью вставлен в базу. Чтобы сбросить сообщение об ошибке, нажмите кнопку  или  на EPG.	
	Индикатор малого заряда на EPG. Зарядите систему.	Неисправность EPG. Нажмите кнопку  и удерживайте ее в течение 30 секунд, затем включите питание или позвоните в службу технической поддержки.

Полную информацию о противопоказаниях и нежелательных реакциях, а также предупреждения, предостережения и инструкции по уходу за изделием см. в руководстве пользователя.

© Bioness Inc., 2022 г.

L300 Go®, Bioness, the Bioness Logo® и LiveOn® являются товарными знаками компании Bioness Inc. в США и других странах. | [www.bioness.com](http://www.bioness.com)