


Сопряжение компонентов

ВАЖНО. Прежде чем выполнять сопряжение с приложением врача, нужно выполнить сопряжение компонентов друг с другом.

- 1 Манжета для бедра с манжетой для голени.
Активация режима сопряжения EPG: одновременно нажмите на кнопки «плюс» и «минус» на каждом EPG. Световой индикатор состояния EPG замигает зеленым, желтым и красным. При необходимости выполните сопряжение между датчиком стопы и EPG манжетой для голени.
- 2 **Активирование режима сопряжения для датчика стопы:** выполните сопряжение датчика стоп и нового EPG, вложив батарею (CR2032) в датчик стопы и нажав на датчик давления; в знак подтверждения режима активации зеленый световой сигнал начнет мигать. Переведите EPG для голени в режим сопряжения.

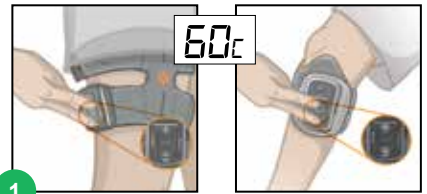


Сопряжение системы и приложения врачебного программатора Bioness

- 1 **Войдите в приложение врачебного программатора Bioness.**
- 2 Нажмите  для доступа к экрану подключения. Включите в системе режим сопряжения, нажав одновременно кнопки «плюс» и «минус» на EPG. Нажмите на значок  подключения над нужной ногой. По завершении сопряжения закройте экран подключения, нажав на .
- 3 Выберите пациента, например, **Работать с существующим пациентом, Создать нового или Выбрать из списка.** При выборе из списка пациентов нажмите на  значок загрузки и дважды щелкните по выбранному имени.



Подгонка системы L300 Go

- 1 Прикрепите персональную панель.
- 2 Надвиньте персональную крышку ремня на ремень манжеты.
- 3 Протрите область стимуляции мягкой влажной салфеткой. Слегка вытяните голень.
- 4 После прикрепления электродов к манжете L300 поместите манжету на ногу, воспользовавшись ограничителем для коленной чашечки на манжете, закрепите ремень и отрегулируйте натяжение.
- 5 Настройте стимуляцию так, чтобы получать желаемый отклик.

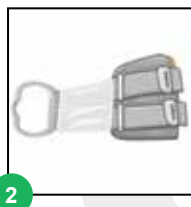


Полную информацию о противопоказаниях и нежелательных реакциях, а также предупреждения, предостережения и инструкции по уходу за изделием см. в руководстве пользователя.

Подгонка отдельной манжеты для бедра L300 Go

- 1 Смочите тканевые электроды для бедра и вставьте их в манжету.
- 2 Протрите область стимуляции мягкой влажной салфеткой. Поместите манжету на бедро не менее чем на три пальца проксимальнее подколенной ямки (точка крепления сухожилия) или коленной чашечки (точка крепления четырехглавой мышцы бедра).
- 3 Выровняйте манжету по средней линии бедра. Застегните ремни.
- 4 Настройте стимуляцию, пока пациент сидит, до получения желаемого отклика.
- 5 При необходимости скорректируйте настройки стимуляции, попросив пациента встать.



1

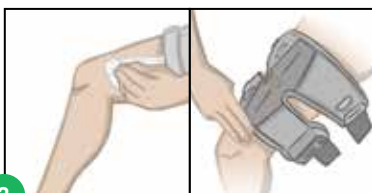

2




3



4

Программирование системы L300 Go

- 1  **Программирование настроек стимуляции.** Выберите нужный EPG на **панели управления стимуляцией**. Выберите тип электрода (на изображении показан экран управляющего электрода). Усадите пациента и нажмите  **Тест** для включения стимуляции на выбранном EPG. Откорректируйте настройки так, чтобы получать желаемый ответ. Нажмите на кнопку  **Тест** для прекращения стимуляции. Повторите эти действия для всех подключенных EPG.
- 2  **Программирование настроек ходьбы.** Нажмите значок **экрана ходьбы**. Нажмите значок  **Волна стим-и** и включите режим ходьбы. Наблюдайте за походкой пациента и отрегулируйте настройки по мере надобности. Нажмите значок  **Волна стим-и** и остановите стимуляцию.
- 3  **Программирование настроек упражнения.** Нажмите значок  **экрана упражнения**. Отрегулируйте настройки упражнения, включая или исключая те или иные EPG по мере надобности. Нажмите **значок упражнения** для включения стимуляции на всех сопряженных устройствах, включенных в режим тренировки. Нажмите  **значок упражнения** для остановки стимуляции.
- 4 В конце каждого сеанса выключайте связь с системой, переходя на экран подключения  и нажимая на  **значок отключения**. Выйдите из приложения для врача.

Примечание. Нажмите и удерживайте значок **ручной стимуляции**  для активации стимуляции на всех сопряженных и активных EPG до тех пор, пока нажата кнопка.



1



2



3



4

