


## وضع سوار التحفيز الوظيفي L300 Go

- 1 أثناء الجلوس، قم بتمديد ساقك قليلاً.
- 2 قم بإمالة الجزء العلوي من سوار L300 Go باتجاهك، ثم حركه على ساقك حتى يصل لأسفل الرضفة. اخفض الجزء السفلي من سوار L300 Go على ساقك.
- 3 امسك سوار L300 Go بإبهامك أو باليد الأخرى على حامل EPG. اسحب مقبض السوار حول الحامل.
- 4 يوضح الشكل 4 وضع سوار L300 Go بشكل صحيح على الساق اليمنى.

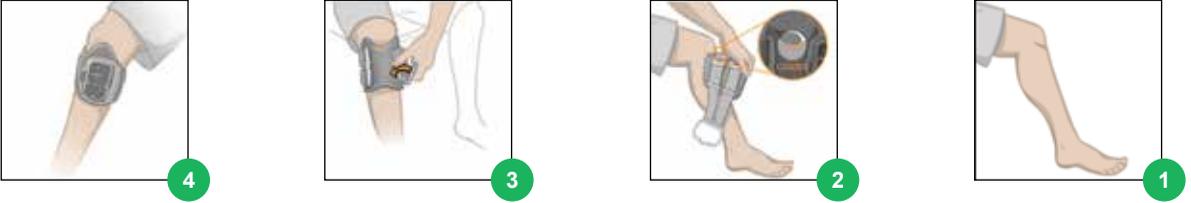


## تشغيل نظام L300 Go



- 1 اضغط على زر تشغيل/إيقاف التشغيل لتشغيل مولد النبض الخارجي.
- 2 حدد إما وضع المشي وإما وضع التدريب:
  - لتحديد وضع المشي، اضغط على زر الوضع لفترة قصيرة.
  - لتحديد وضع التدريب، اضغط بشكل مستمر على زر الوضع لمدة 3 ثوان.
 سيخزن EPG الوضع الجديد مع ردود الفعل الصوتية واللمسية. للخروج من وضع التدريب، اضغط بشكل مستمر على زر الوضع لمدة 3 ثوان.
- 3 إذا لزم الأمر، فاضبط مستوى كثافة التحفيز بالضغط على زر علامة الجمع أو زر علامة الطرح .

## شحن البطاريات

قم بتوصيل جهاز شحن النظام بـ EPG، ثم قم بتوصيله بمقبس الحائط.

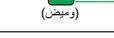بطارية EPG ضعيفة	يومض شريط مؤشر حالة EPG بضوء أحمر مع ضوء مؤشر البطارية الذي يومض بضوء أصفر	
البطارية مُنخفضة	يومض باللون الأصفر	
الشحن	يومض باللون الأخضر	
اكتمل الشحن	أخضر ثابت	



## مؤشرات مولد النبض الخارجي

النظام قيد التشغيل	يومض باللون الأخضر	
التحفيز في وضع إيقاف التشغيل	يومض باللون الأخضر	
التحفيز في وضع التشغيل	يومض باللون الأصفر	
خطأ نشط	وميض أحمر بتنبه مسموع	
خلل في عمل EPG	أحمر ثابت	



## شاشات وحدة التحكم\*

النظام قيد التشغيل	متصل	
النظام في وضع المشي/التدريب، التحفيز ممكن لكن متوقف	موجات التحفيز مرئية	
النظام في وضع المشي/التدريب، التحفيز جاهز وقيد التشغيل	موجات التحفيز تومض	
مستوى الكثافة	مؤشرات 0-9	
تم تفعيل وضع المشي	مؤشر أيقونة المشي	
تم تفعيل وضع التدريب	مؤشر أيقونة التدريب	
الصوت قيد التشغيل	مؤشر أيقونة الصوت	



\*مكون اختياري

## مؤشرات خطأ النظام

خطأ بالوصلة الكهربائية. تأكد من توصيل الأقطاب الكهربائية ووضع EPG بالكامل على الحامل. امسح تنبيه الخطأ بالضغط على + أو - في مولد النبض الخارجي.		
مؤشر انخفاض طاقة البطارية على EPG. شحن النظام.		خلل في عمل EPG. اضغط بشكل متصل لمدة 30 ثانية على زر  ثم قم بالتشغيل أو اتصل بالدعم الفني.

للحصول على قائمة كاملة بكل التعارضات والتحذيرات وردود الأفعال العكسية والاحتياطات وإرشادات العناية، الرجاء الاطلاع على دليل المستخدم.

حقوق الطبع والنشر © لعام 2022 محفوظة لشركة Bioness Inc.

www.bioness.com | LiveOn® و Bioness® هي علامات تجارية لشركة Bioness بالولايات المتحدة أو بلدان أخرى.