


## Colocação do manguito de estimulação funcional do L300 Go

- 1 Sente-se e estenda ligeiramente a parte inferior da perna.
- 2 Incline a parte superior do manguito do L300 Go em direção a você, e em seguida, deslize-o para cima ao longo da perna até que o localizador esteja abaixo da rótula do joelho. Abaixar a parte inferior do manguito do L300 Go até encostar na perna.
- 3 Segure o manguito do L300 Go no lugar com o polegar ou a outra mão no suporte do EPG. Puxe a alça da correia ao redor do suporte.
- 4 A Figura 4 mostra o manguito do L300 Go colocado corretamente na perna direita.



1

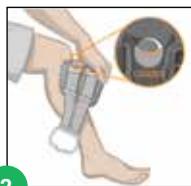

2



3



4

## Operação do Sistema L300 Go



- 1 Pressione o botão  Liga/Desliga para ligar o EPG.
- 2 Selecione o modo de andadura ou de treinamento:
  - Para selecionar o modo de andadura, pressione o botão  de modo *rapidamente*.
  - Para selecionar o modo de treinamento, pressione e *segure* o botão  de modo por três segundos.  
O EPG confirmará o novo modo com feedback sonoro e tátil.  
Para sair do modo de treinamento, pressione e *segure* o  botão de modo por três segundos.
- 3 Se necessário, ajuste o nível de intensidade da estimulação pressionando o botão  mais ou  menos.

## Carregamento das baterias

Conecte o carregador do sistema ao EPG e ligue-o a uma tomada.



 (piscando)	A barra indicadora de status do EPG pisca em vermelho junto com a luz indicadora da bateria que pisca em amarelo	Bateria fraca do EPG
 (piscando)	Pisca em amarelo	Bateria fraca
 (piscando)	Pisca em verde	Carregando
 (piscando)	Verde permanente	Carregamento completo

## Exibições do EPG



 (piscando)	Pisca em verde	O sistema está ligado
 (piscando)	Pisca em verde	A estimulação está desativada
 (piscando)	Pisca em amarelo	A estimulação está ativada
 (piscando)	Pisca em vermelho com alarme sonoro	Erro ativo
 (piscando)	Vermelho permanente	Mau funcionamento do EPG

## Exibições da unidade de controle\*



	Permanente	O sistema está ligado
	Onda de estimulação visível	O sistema está em andadura/treinamento, a estimulação está habilitada, mas desativada
	Onda de estimulação piscando	O sistema está em andadura/treinamento, a estimulação está habilitada e ativada
	Mostra de 0 a 9	Nível de intensidade
	Mostra o ícone de andadura	O modo de andadura está habilitado
	Mostra o ícone de treino	O modo de treino está habilitado
	Mostra o ícone de áudio	O áudio está ativado

\*Componente opcional

## Sinais de erro do sistema

 (piscando)	Contato defeituoso dos eletrodos. Certifique-se de que os eletrodos estejam encaixados, e o EPG esteja bem encaixado no suporte. Apague o alerta de erro pressionando  ou  no EPG.	
 (piscando)	Indicador de bateria fraca no EPG. Carregue o sistema.	 (piscando)
	Mau funcionamento do EPG. Pressione e segure o botão  por 30 segundos e ligue o aparelho, ou entre em contato com a Assistência Técnica.	

Para obter uma lista completa de todas as contra-indicações, advertências, reações adversas, precauções e instruções de cuidados, consulte o manual do usuário.

©2022 Bioness Inc.

L300 Go®, Bioness, o logotipo Bioness® e LiveOn® são marcas comerciais da Bioness Inc. nos Estados Unidos ou em outros países. | [www.bioness.com](http://www.bioness.com)