


התאמת הרכיבים

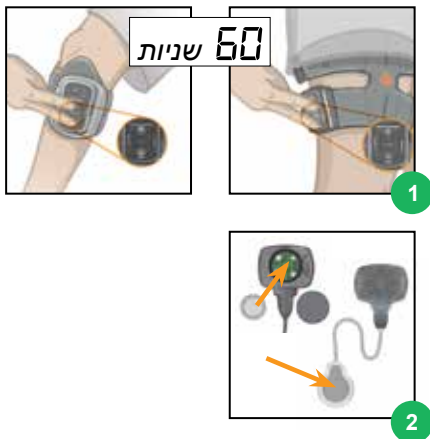

חשוב: התאם את רכיבי המערכת לפני ההתאמה ליישום המטפל

- 1 **FS לירך עם סד FS לירך.**
הפעלת מצב התאמה ל-EPG: לחץ בו-זמנית על לחצני הפלוס והמינוס בכל EPG. נורית מחוון מצב ה-EPG תהבהב בירוק, בצהוב ובאדום. במידת הצורך, התאם את חיישן כף הרגל ל-EPG של סד ה-FS התחתון.
- 2 **הפעלת מצב צימוד לחיישן כף הרגל:** התאם את חיישן כף הרגל ל-EPG החדש באמצעות הכנסת סוללה (CR2032) לתוך חיישן כף הרגל ולחיצה על חיישן הלחץ. הנורית הירוקה תהבהב כדי לאשר את הפעלת מצב ההתאמה. העבר את ה-EPG התחתון למצב התאמה.

התאמת המערכת ליישום Bioness Clinician Programmer



- 1 **היכנס ליישום Bioness Clinician Programmer**
- 2 **בחר** כדי לגשת אל מסך הקישור. העבר את המערכת למצב התאמה ידי לחיצה בו-זמנית על לחצני הפלוס והמינוס ב-EPG. לחץ על (סמל הקישור) מעל לרגל הרצויה. לאחר ההתאמה, צא ממסך הקישור על ידי לחיצה על .
- 3 **בחר מטופל – כלומר, *Work with Existing patient* (עבודה עם מטופל קיים), *Create New* (צור חדש) או *Choose from List* (בחר מהרשימה).**
אם אתה בוחר מתוך ה-Patient List (רשימת מטופלים), לחץ על (סמל הטעינה) או לחץ לחיצה כפולה על השם שנבחר.

התאמת המערכת L300 Go

- 1 **הצמד את הלוח האישי.**
- 2 **החלק את כיסוי הרצועה האישית מעל לרצועת הסד.**
- 3 **נגב את אזור הגירוי במטלית רכה ולחה.** לאחר מכן, ישר מעט את החלק התחתון של הרגל.
- 4 **לאחר חיבור האלקטרודה(ות) אל סד הגירוי התפקודי L300, הנח את הסד על הרגל באמצעות סימן המיקום של פיקת הברך.** הדק את הרצועה והתאם את המתיחות.
- 5 **תכנת את הגדרות הגירוי כדי להשיג את התגובה הרצויה.**



לרשימה מלאה של התוויות נגד, אזהרות, תופעות לוואי, אמצעי זהירות והוראות טיפול, עיין במדריך למשתמש.

התאמת סד ה-FS העצמאי לירך L300 Go

- 1 הרטב את אלקטרודות הברד לירך וחבר אותן לסד.
- 2 נגב את אזור הגירוי במטלית רכה ולחה. הנח את הסד על הירך במרחק שאינו עולה על שלוש אצבעות מעל לחלק האחורי של הברך (בהנחה על שרירי מיתר הברך) או מעל לפיקת הברך (בהנחה על השריר הארבע-ראשי).
- 3 מרכז את הסד על קו האמצע של הירך. הדק את הרצועות.
- 4 תכנת את הגדרות הגירוי כשהמטופל במצב ישיבה כדי להשיג את התגובה הרצויה.
- 5 במידת הצורך, התאם את הגדרות הגירוי כשהמטופל במצב עמידה.



תכנות המערכת L300 Go

- 1 **הגדרות תכנות הגירוי.** בחר את ה-EPG הרצוי **בלוח המחוונים של בקרת הגירוי.** בחר את סוג האלקטרודה (במסך אלקטרודות הניתוב המוצג בתמונה). כשהמטופל במצב ישיבה, לחץ על הלחצן **בדיקה** כדי להפעיל את הגירוי ב-EPG שנבחר. התאם את ההגדרות כדי להשיג את התגובה הרצויה. לחץ על **בדיקה** כדי להפסיק את הגירוי. חזור על שלב זה עבור כל יחידות ה-EPG המחוברות.
 - 2 **תכנות הגדרות הליכה.** לחץ על **סמל מסך ההליכה.** לחץ על **סמל גל הגירוי** כדי לאפשר מצב הליכה. התבונן בהליכת המטופל והתאם את ההגדרות לפי הצורך. לחץ על **סמל גל הגירוי** כדי לעצור את הגירוי.
 - 3 **הגדרות אימון לפי תוכנית.** לחץ על **סמל מסך האימון**. התאם את הגדרות האימון, תוך הוספה או החרגה של EPG ספציפי לפי הצורך. לחץ על **סמל האימון** כדי להפעיל את הגירוי בכל ההתקנים המותאמים הכלולים במצב האימון. לחץ על **סמל האימון** כדי להפסיק את הגירוי.
 - 4 בסוף כל אימון, בטל את קישור המערכת באמצעות ניווט אל מסך הקישור ולחיצה על **סמל ביטול הקישור**. צא מיישום המטפל.
- הערה: לחץ והחזק את הסמל (גירוי ידני) כדי להפעיל את הגירוי בכל יחידות ה-EPG המותאמות והפעילות בזמן שהלחצן לחוץ.

