


Подгонка беспроводного ортеза H200

- 1 Выберите ортез подходящего размера, а затем прикрепите подходящую опору для тенара.
- 2 Прикрепите подходящую запястную вставку.
- 3 Наденьте ортез и проверьте прилегание электрода FPL № 5 к запястью. Если есть зазор, прикрепите и затяните запястный ремень.
- 4 Если зазор присутствует по-прежнему, снимите ортез и прикрепите панель для FPL (длинного сгибателя большого пальца кисти).
- 5 Выберите и прикрепите подгоночную панель для разгибателя, которая позволит добиться нужного движения кисти/пальца. Начните с подгоночной панели А.
- 6 Выберите и прикрепите подгоночную панель для сгибателя, которая позволит добиться нужного движения кисти/пальца. Начните с подгоночной панели А.
- 7 Смочите все тканевые электроды.
- 8 Прикрепите тканевые электроды к основаниям электродов.
- 9 Наденьте ортез.
- 10 Задайте параметры стимуляции.



Задание параметров стимуляции


- 1 Войдите в программу H200 Wireless. Выберите запись пациента и нажмите «Открыть» или нажмите «Новый», чтобы создать запись пациента.
- 2 В меню «Программы» нажмите «Параметры стимуляции».
- 3 Задайте параметры стимуляции для разгибателей и сгибателей. Нажмите кнопку «Запуск», чтобы включить стимуляцию. Нажмите «Стоп», чтобы остановить стимуляцию. При необходимости отключите кнопку «Активировать» на ортезе. Нажмите «Назад», чтобы вернуться в меню «Программы».

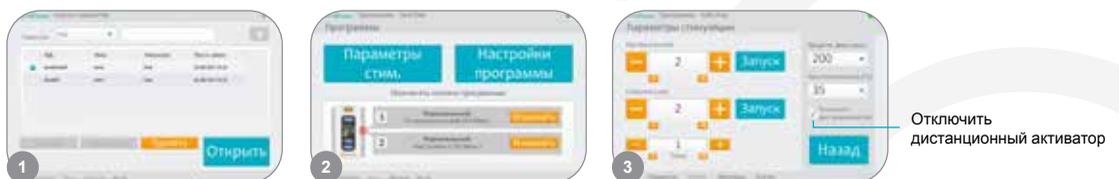

Полную информацию о противопоказаниях и нежелательных реакциях, а также предупреждения, предостережения и инструкции по уходу за изделием см. в руководстве для врача.



Задание настроек программы

- 1 В меню «Программы» нажмите «Настройки программы».
- 2 В окне «Настройки программы» выберите программу. Откроется окно программы.
- 3 Для программ разделов «Функц. тренировка» и «Двигат. нейромодул.» после задания настроек нужно нажать «Запуск», чтобы включить стимуляцию. Нажмите «Стоп», чтобы остановить стимуляцию.
- 4 Для программ раздела «Нейропротез» после задания настроек стимуляция включается нажатием кнопки «Активировать» на ортезе. Когда этап будет завершен, нажмите кнопку «Активировать» еще раз, чтобы запустить следующую фазу программы. Нажмите «Стоп», чтобы остановить стимуляцию.

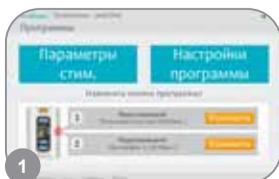

Назначение пользовательских программ для кнопок 1 и 2 блока управления

- 1 В меню «Программы» нажмите  «Изменить» или  «Изменить», чтобы открыть окно «Назначить для кнопки 1» или «Назначить для кнопки 2».
- 2 Выберите программу из списка, нажмите «Изменить», чтобы изменить настройки программы, и/или нажмите «Назад», чтобы назначить программу.
- 3 Чтобы создать и назначить персональную пользовательскую программу, выберите опцию «Персон. польз. настройка» и нажмите «Изменить». По мере необходимости возможны добавление, удаление, редактирование сегментов программ, а также изменение порядка их следования. Задайте длительность сегмента и общую длительность программы, а затем нажмите «Назад».

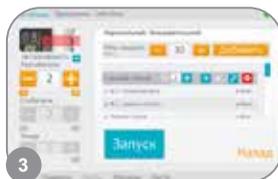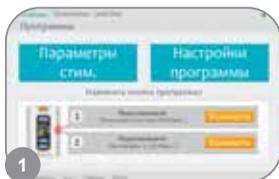

Использование клинического режима

- 1 Выключите блок управления H200 Wireless. Нажмите и **удерживайте** кнопку минуса . **Кратковременно** нажмите на кнопку включения/выключения . На цифровом дисплее будут попеременно отражаться значение уровня интенсивности стимуляции и буквенное обозначение программы «А».
- 2 Клинические программы (А–G) выбираются с помощью кнопок выбора программы на боковой стороне блока управления.
- 3 Нажмите кнопку «Активировать» , чтобы включить/выключить стимуляцию.
- 4 Нажмите кнопку включения/выключения , чтобы выйти из клинического режима.

