


Opladning af H200 Wireless-systemet


Slut systemopladersættet til H200 Wireless-ortosen og H200 Wireless-kontrolenheden samtidigt. Oplad H200 Wireless-systemet dagligt

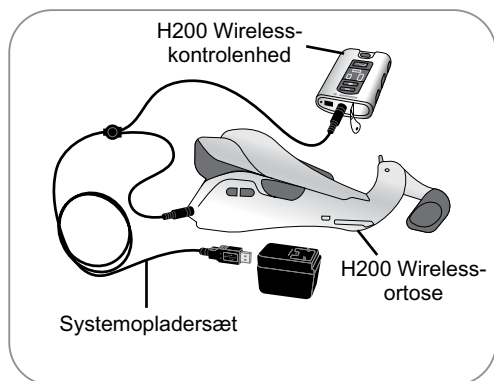

Opladningsvisninger på kontrolenheden		
	Blinker gult	Lavt batteriniveau
	Roterende grøn cirkel	Oplader
	Vandret grøn linje	Fuldt opladet
Opladningsvisninger på ortosen		
	Statusindikator blinker gult	Lavt batteriniveau
	Statusindikator blinker gult og grønt	Oplader
	Statusindikator lyser konstant grønt	Fuldt opladet

Påsætning af H200 Wireless-ortosen


- 1 Fugt tekstilelektroderne, og sæt dem på.
- 2 Placer ortosen på en stabil overflade, og sæt hånden ind i spiraltappen. Thenaren (med tilsluttet elektrode) skal hvile på tommelfingerroden.
- 3 Anbring håndledsstøtten i en behagelig stilling bag på håndleddet.
- 4 Anbring underarmen i ortosens fleksorstøtte.
- 5 Luk ekstensorskinnen.
- 6 Stram evt. håndledsremmen.

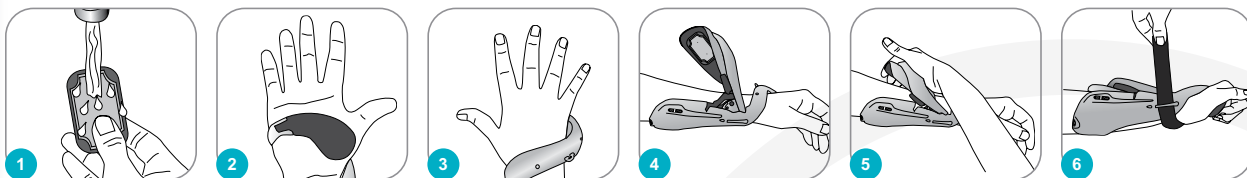







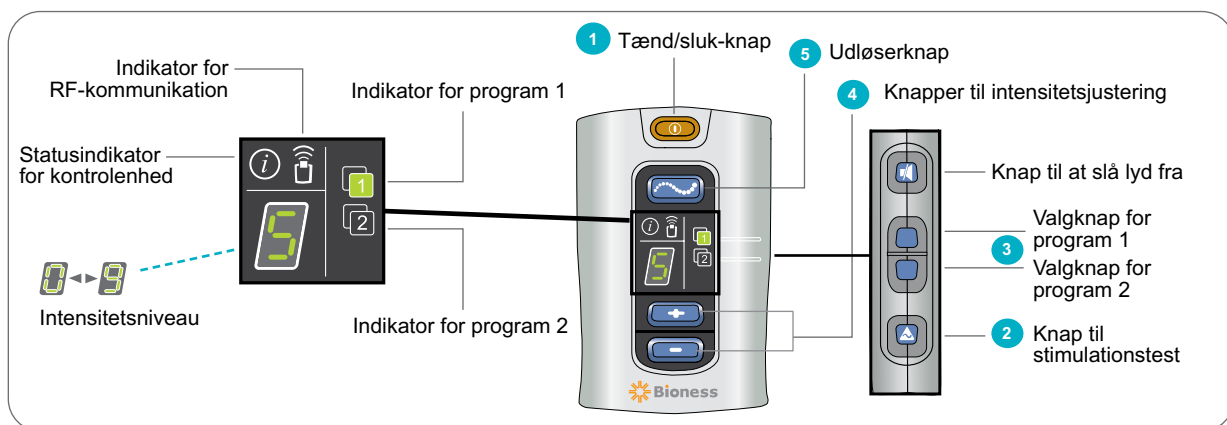

Visninger på H200 Wireless-ortosen








Systemet er tændt Statusindikator blinker grønt	Stimulationen er slået til Stimulationsindikator blinker gult	Stimulationen er midlertidigt afbrudt Stimulationsindikator lyser gult	Defekt elektrodekontakt Statusindikator blinker rødt	Hardware-/softwarefej; opladningsfej Statusindikator lyser konstant rødt

Brug af H200 Wireless-systemet



- 1 **Tænd systemet.** Tryk på tænd/sluk-knappen .
- 2 **Test placeringen af ortosen.** Tryk én gang på knappen til stimulationstest , og hold den nede for at teste ekstensormusklerne. Slip knappen, og tryk og hold nede igen for at teste fleksormusklerne. Gentag efter behov.
- 3 **Vælg program 1 eller program 2.** Tryk på valgknappen for program 1 eller program 2 på siden af kontrolenheden. Den valgte programindikator bliver GRØN:  eller .
- 4 **Juster evt. niveauet for stimulationsintensitet.** Tryk på knappen plus  eller minus  for at øge/reducere stimulationsintensiteten i ortosen.
- 5 **Start et program.** Tryk på udløserknappen  på kontrolenheden eller på ortosen for tænde for stimulation. **Start/genoptag et program** ved at trykke på udløserknappen på kontrolenheden eller på ortosen.
Bemærk! Neuroprosthesis-programmer kan ikke afbrydes midlertidigt. Hvis der trykkes på udløserknappen, når der er tændt for stimulation, startes den næste fase i programmet.
Sluk stimulationen ved at trykke på tænd/sluk-knappen .

Visninger på H200 Wireless-kontrolenheden

	Tænd/sluk-knappen blinker grønt	Systemet er tændt
	Udløserknappen blinker hurtigt gult	Stimulationen er slået til
	Udløserknappen lyser gult	Stimulationen er midlertidigt afbrudt
	Indikatoren for program 1 lyser grønt	Program 1 er valgt
	Indikatoren for program 2 lyser grønt	Program 2 er valgt
	Statusindikatoren for kontrolenheden lyser rødt	Fejl i kontrolenhed: opladningsfejl, registreringsfejl, softwarefejl
	Indikatoren for RF-kommunikation blinker rødt	Fejl i RF-kommunikation

Se brugervejledningen for at få en komplet liste over alle kontraindikationer, advarsler, bivirkninger, forholdsregler og vedligeholdelsesinstrukser.

©2023 Bioness Inc.

H200® Wireless, Bioness, Bioness-logoet® og LiveOn® er registrerede varemærker tilhørende Bioness Inc. i USA eller andre lande. | www.bioness.com