


Käyttäjän pikaopas



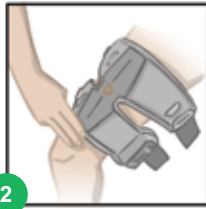



L300 Go -reisimansetin asettaminen

- 1 Kastele kankaiset reiden elektrodit ja kiinnitä ne L300 Go -reisimansettiin.
- 2 Etureisilihakseen istuma-asennossa asetettaessa aseta L300 Go -reisimansetti reiteen ja aseta kohdistin kolmen sormen etäisyydelle polvesta.
- 3 Varmista, että asetat L300 Go -reisimansetin valtuutetun terveydenhuollon ammattilaisen määrittämään kohtaan. Katso kuva 3.
- 4 Takareisilihakseen istuma- tai seisoma-asennossa asetettaessa aseta L300 Go -reisimansetti vähintään neljä sormenleveyttä polvitaiteen yläpuolelle pakarän ja reiden taitekohdan alapuolelle. Katso kuva 4.



L300 Go -järjestelmän käyttäminen



- 1 Käynnistä EPG painamalla virtapainiketta .
- 2 Valitse joko kävely- tai harjoitustila:
 - Voit valita kävelytilan painamalla  -tilapainiketta *lyhyesti*.
 - Voit valita harjoitustilan *pitämällä*  -tilapainiketta painettuna 3 sekunnin ajan. EPG vahvistaa uuden tilan ääni- ja värinäpalautteella. Voit poistua harjoitustilasta pitämällä  -tilapainiketta painettuna 3 sekunnin ajan.
- 3 Säädä tarvittaessa stimulaation voimakkuustasoa pluspainikkeella  tai miinuspainikkeella .

Akkujen lataaminen

Kytke järjestelmän laturi EPG:hen ja kytke sitten virtajohto pistorasiaan.



	EPG:n tilan ilmaisinpalkki vilkkuu punaisena ja akun merkivalo vilkkuu keltaisena	EPG:n akun varaus on vähissä
	Vilkkuu keltaisena	Akkuvirtaa vähän jäljellä
	Vilkkuu vihreänä	Lataaminen
	Jatkuva vihreä	Täyteen ladattu

EPG-näytöt



	Vilkkuu vihreänä	Järjestelmän virta on kytketty
	Vilkkuu vihreänä	Stimulaatio on pois käytöstä
	Vilkkuu keltaisena	Stimulaatio on käynnissä
	Punainen vilkkuu ja äänimerkki kuuluu	Aktiivinen virhe
	Jatkuva punainen	EPG:n toimintahäiriö

Ohjausyksikön näytöt*



	Jatkuva	Järjestelmän virta on kytketty
	Stim.-aalto näkyy	Järjestelmä on kävely-/harjoitustilassa, stimulaatio on käytettävissä, mutta pois käytöstä
	Stim.-aalto vilkkuu	Järjestelmä on kävely-/harjoitustilassa, stimulaatio on käytettävissä ja käytössä
	Numerot 0–9	Voimakkuustaso
	Kävelykuvake näkyy	Kävelytila on käytettävissä
	Harjoituskuvake näkyy	Harjoitustila on käytettävissä
	Äänikuvake näkyy	Ääni on käytössä

*Valinnainen komponentti

Järjestelmän virhenäytöt

	Virheellinen elektrodikontakti. Varmista, että elektrodit on napsautettu paikoilleen ja EPG on kunnolla kannattimessa. Poista virheilmoitus painamalla EPG:ssä tai -painiketta.	
	EPG:n akun matalan varauksen ilmaisin. Lataa järjestelmä.	
		EPG:n toimintahäiriö. Pidä -painiketta painettuna 30 sekunnin ajan ja kytke sitten virta tai soita tekniseen tukeen.

