

L300 Go Functional Stimulation -mansetin asettaminen

- 1 Istu ja ojenna jalkaa hieman.
- 2 Kallista L300 Go -mansetin yläosaa itseäsi kohti ja liu'uta sitä ylös jalkaa pitkin, kunnes kohdistin on polvilumpion alapuolella. Laske L300 Go -mansetin alaosa jalkaa vasten.
- 3 Pidä L300 Go -mansettia paikoillaan EPG-kannattimessa peukalollasi tai toisella kädellä. Vedä hihnan kahva kannattimen ympärille.
- 4 Kuvassa 4 näkyy L300 Go -mansetin oikea asetus oikeassa jalassa.



1



2








3



4

L300 Go -järjestelmän käyttäminen






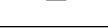
- 1 Käynnistä EPG painamalla virtapainiketta .
- 2 Valitse joko kävely- tai harjoitustila:
 - Voit valita kävelytilan painamalla  -tilapainiketta *lyhyesti*.
 - Voit valita harjoitustilan *pitämällä*  -tilapainiketta painettuna 3 sekunnin ajan. EPG vahvistaa uuden tilan ääni- ja värinäpalautteella. Voit poistua harjoitustilasta pitämällä  -tilapainiketta painettuna 3 sekunnin ajan.
- 3 Säädä tarvittaessa stimulaation voimakkuustasoa pluspainikkeella  tai miinuspainikkeella .



Akkujen lataaminen






Kytke järjestelmän laturi EPG:hen ja kytke sitten virtajohto pistorasiaan.



 (vilkkuu)	EPG:n tilan ilmaisinpalkki vilkkuu punaisena ja akun merkkivalo vilkkuu keltaisena	EPG:n akun varaus on vähissä
 (vilkkuu)	Vilkkuu keltaisena	Akkuvirtaa vähän jäljellä
 (vilkkuu)	Vilkkuu vihreänä	Lataaminen
	Jatkuva vihreä	Täyteen ladattu








EPG-näytöt



 (vilkkuu)	Vilkkuu vihreänä	Järjestelmän virta on kytketty
 (vilkkuu)	Vilkkuu vihreänä	Stimulaatio on pois käytöstä
 (vilkkuu)	Vilkkuu keltaisena	Stimulaatio on käynnissä
 (vilkkuu)	Punainen vilkkuu ja äänimerkki kuuluu	Aktiivinen virhe
	Jatkuva punainen	EPG:n toimintahäiriö

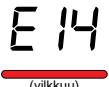





Ohjausyksikön näytöt*



	Jatkuva	Järjestelmän virta on kytketty
	Stim.-aalto näkyy	Järjestelmä on kävely-/harjoitustilassa, stimulaatio on käytettävissä, mutta pois käytöstä
	Stim.-aalto vilkkuu	Järjestelmä on kävely-/harjoitustilassa, stimulaatio on käytettävissä ja käytössä
	Numerot 0–9	Voimakkuustaso
	Kävelykuvake näkyy	Kävelytila on käytettävissä
	Harjoituskuvake näkyy	Harjoitustila on käytettävissä
	Äänikuvake näkyy	Ääni on käytössä

*Valinnainen komponentti

Järjestelmän virhenäytöt

 (vilkkuu)	Virheellinen elektrodikontakti. Varmista, että elektrodit on napsautettu paikoilleen ja EPG on kunnolla kannattimessa. Poista virheilmoitus painamalla EPG:ssä  - tai  -painiketta.		
 (vilkkuu)	EPG:n akun matalan varauksen ilmaisin. Lataa järjestelmä.		EPG:n toimintahäiriö. Pidä  -painiketta painettuna 30 sekunnin ajan ja kytke sitten virta tai soita tekniseen tukeen.

Täydellinen luettelo kaikista vasta-aiheista, varoituksista, haittavaikutuksista ja hoito-ohjeista on käyttöohjeessa.