


## Sätta på L300 Go-manschetten för funktionell stimulering

- 1 Sitt ned och sträck fram underbenet något.
- 2 Luta överdelen av L300 Go-manschetten mot dig och dra den sedan uppåt längs benet tills lokaliseraren vilar under knäskålen. Lägg underdelen av L300 Go-manschetten mot benet.
- 3 Håll L300 Go-manschetten på plats med tummen eller andra handen på EPG-hållaren. Dra remhandtaget runt hållaren.
- 4 Bild 4 visar L300 Go-manschetten rätt placerad på höger ben.



1

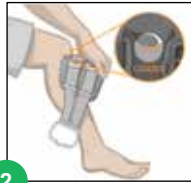

2









3



4

## Använda L300 Go-systemet



- 1 Tryck på på/av-knappen  för att slå på EPG.
- 2 Välj antingen gång- eller träningsläge:
  - För att välja gångläge trycker du in lägesknappen  en kort stund.
  - För att välja träningsläge trycker du in lägesknappen  i 3 sekunder. EPG bekräftar det nya läget med ljud och taktilt gensvar. För att avsluta träningsläget håller du lägesknappen  intryckt i 3 sekunder.
- 3 Vid behov kan du justera stimuleringsstyrkan genom att trycka på plus-  eller minus-knappen .

## Ladda batterierna

Anslut systemladdarsetet först till EPG och sedan till ett vägguttag.



|  |  |                          |
|--|--|--------------------------|
|  | EPG-statusfältet blinkar rött och batterilampan blinkar gult | Lågt EPG-batteri         |
|  | Blinkar gult   | Låg batteriladdningsnivå |
|  | Blinkar grönt  | Laddning                 |
|  | Fast grönt sken  | Fulladdad                |

## EPG-visning



|  |                           |                     |
|--|---------------------------|---------------------|
|  | Blinkar grönt             | Systemet är på      |
|  | Blinkar grönt             | Stimuleringen är av |
|  | Blinkar gult              | Stimuleringen är på |
|  | Blinkar rött med ljudlarm | Aktivt fel          |
|  | Fast rött sken            | EPG-funktionsfel    |

## Styrenhetsvisning\*



|  |                         |  |
|--|-------------------------|--|
|  | Fast                    | Systemet är på   |
|  | Stimuleringsvåg synlig  | Systemet är i läget gång/träning, stimulering är aktiverad men inte på |
|  | Stimuleringsvåg blinkar | Systemet är i läget gång/träning, stimulering är aktiverad och på      |
|  | Visar 0–9               | Intensitetsnivå  |
|  | Visar gångikon          | Gångläge är aktiverat  |
|  | Visar träningsikon      | Träningsläget är aktiverat   |
|  | Visar ljudikon          | Ljudet är på   |

\* Valfri komponent

## Systemfelsvisning

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | Fel på elektrodkontakt. Se till att elektroderna är intryckta och att EPG är helt införd i hållaren. Ta bort felmeddelandet genom att trycka på  eller  på EPG. |   |
|  | Lampa för lågt batteri på EPG. Ladda systemet.  |   |
|  |   | EPG-funktionsfel. Håll knappen  intryckt i 30 sekunder, starta sedan om eller ring teknisk support. |

En fullständig lista över alla kontraindikationer, varningar, biverkningar, försiktighetsåtgärder och skötselinstruktioner finns i användarhandboken.

©2022 Bioness Inc.

L300 Go®, Bioness, Bioness-logotypen® och LiveOn® är registrerade varumärken som tillhör Bioness Inc. i USA eller i andra länder. | [www.bioness.com](http://www.bioness.com)