

Thigh Plus/Stand-Alone

Felhasználói referenciakártya

L300 Go 







Az L300 Go combmandzsetta felvétele

- 1 Nedvesítse meg a combi szövetelektrodákat, majd csatlakoztassa őket az L300 Go combmandzsetthoz.
- 2 A készülék felhelyezése a négyfejű combizomra ülés közben: helyezze az L300 Go combmandzsettát a combjára, majd helyezze a pozicionálót három ujj távolságra a térdétől.
- 3 Az L300 Go combmandzsettát az orvos által megállapított illesztési pozícióba helyezze. Lásd a 3. ábrát.
- 4 A készülék felhelyezése a combhajlító izomra ülés vagy állás közben: az L300 Go combmandzsettát a térdtől mért legalább négy ujj távolságra helyezze el a térdhajlat felett, közvetlenül a fenékvonal alatt. Lásd a 4. ábrát.



Az L300 Go rendszer használata



- 1 Az EPG bekapcsolásához nyomja meg a  be-/kikapcsológombot.
- 2 Válasszon a járás és az edzés mód közül:
 - A járás mód kiválasztásához nyomja meg *röviden* a  üzemmód gombot.
 - Az edzés mód kiválasztásához nyomja meg, majd 3 másodpercig *tartsa lenyomva* a  üzemmód gombot. Az EPG hangjelzéssel és rezgéssel nyugtázza az új üzemmódot. Az edzés mód bezárásához nyomja meg, majd 3 másodpercig *tartsa lenyomva* a  üzemmód gombot.
- 3 Szükség esetén a  plusz vagy a  mínusz gomb megnyomásával állítsa be a stimuláció intenzitásszintjét.

Az ellenjavallatok, figyelmeztetések, mellékhatások, óvintézkedések és kezelési utasítások teljes listáját a Használati útmutatóban találja.

Az L300 Go®, a Bioness, a Bioness logó® és a LiveOn® a Bioness Inc. védjegyei az Egyesült Államokban vagy más országokban. | www.bioness.com

 **bioness**[®]
A Bioventus Rehab Company

Az akkumulátorok töltése

Csatlakoztassa a töltőt az EPG-hez, majd a másik végét csatlakoztassa a konnektorhoz.



	Az EPG állapotjelző sávja piros, az akkumulátor jelzőfénye pedig sárga fényel villog	Az EPG töltöttségi szintje alacsony
	Sárgán villog	Alacsony töltöttségi szint
	Zölden villog	Töltés
	Folyamatos zöld színnel világít	Teljesen feltöltve

Az EPG jelzései



	Zölden villog	A rendszer be van kapcsolva
	Zölden villog	A szimuláció ki van kapcsolva
	Sárgán villog	A stimuláció be van kapcsolva
	Hangjelzés kíséretében pirosan villog	Aktív hiba
	Folyamatosan pirosan világít	Az EPG meghibásodott

A vezérlőegység jelzései*



	Fekete (egyéb jelzés nélkül)	A rendszer be van kapcsolva
	Stimulációs hullám látható	A rendszer járás/edzés módban van, a stimuláció engedélyezve van, de ki van kapcsolva
	Villogó stimulációs hullám	A rendszer járás/edzés módban van, a stimuláció engedélyezve van és be van kapcsolva
	0 és 9 közötti érték	Intenzitásszint
	Járási ikon megjelenítése	Járási mód engedélyezve
	Edzési ikon megjelenítése	Edzési mód engedélyezve
	Hang ikon megjelenítése	Hang bekapcsolva

*Opcionális komponens

A rendszer hibajelzései

	Hibás elektródaérintkezés Ellenőrizze, hogy az elektródák a helyükre pattantak-e, az EPG pedig teljesen a tartójában van-e. Az EPG + vagy - gombja segítségével törölheti a hibaüzenetet.	
	Az akkumulátor alacsony töltöttségének jelzése az EPG-n. Töltse fel a rendszert.	
	Az EPG meghibásodott. Nyomja meg, majd 30 másodpercig tartsa lenyomva a gombot, majd kapcsolja be a készüléket, vagy vegye fel a kapcsolatot a műszaki ügyfélszolgálatlal.	



Bioness Inc.
25103 Rye Canyon Loop
Valencia, CA 91355
Telefon: 800.211.9136
E-mail: info@bioness.com
Weboldal: www.bioness.com

