

Az L300 Go funkcionális stimulációs mandzsetta felvétele

- 1 Ülő helyzetben kissé tolja előre a lábszárát.
- 2 Döntse maga felé az L300 Go mandzsetta felső részét, majd csúsztassa fel a lábán addig, amíg közvetlenül a térdkalácsa alá nem kerül a pozicionálóelem. Engedje rá az L300 GP mandzsetta alját a lábára.
- 3 Tartsa az L300 Go mandzsettát a helyén, közben pedig a hüvelykujjával vagy a másik kezével tartsa meg az EPG tartóelemét. Tekerje a fogantyúval ellátott szíjat a tartóelem köré.
- 4 A 4. ábrán az L300 Go mandzsetta megfelelő felhelyezése látható (a jobb lábon).



1



2









3



4

Az L300 Go rendszer használata



- 1 Az EPG bekapcsolásához nyomja meg a  be-/kikapcsológombot.
- 2 Válasszon a járás és az edzés mód közül:
 - A járás mód kiválasztásához nyomja meg *röviden* a  üzemmód gombot.
 - Az edzés mód kiválasztásához nyomja meg, majd 3 másodpercig *tartsa lenyomva* a  üzemmód gombot. Az EPG hangjelzéssel és rezgéssel nyugtázza az új üzemmódot. Az edzés mód bezárásához nyomja meg, majd 3 másodpercig tartsa lenyomva a  üzemmód gombot.
- 3 Szükség esetén a  plusz vagy a  mínusz gomb megnyomásával állítsa be a stimuláció intenzitásszintjét.

Az akkumulátorok töltése

Csatlakoztassa a töltőt az EPG-hez, majd a másik végét csatlakoztassa a konnektorhoz.



	Az EPG állapotjelző sávja piros, az akkumulátor jelzőfénye pedig sárga fénnel villog	Az EPG töltöttségi szintje alacsony
	Sárgán villog	Alacsony töltöttségi szint
	Zölden villog	Töltés
	Folyamatos zöld színnel világít	Teljesen feltöltve

Az EPG jelzései



	Zölden villog	A rendszer be van kapcsolva
	Zölden villog	A szimuláció ki van kapcsolva
	Sárgán villog	A stimuláció be van kapcsolva
	Hangjelzés kíséretében pirosan villog	Aktív hiba
	Folyamatosan pirosan világít	Az EPG meghibásodott

A vezérlőegység jelzései*



	Fekete (egyéb jelzés nélkül)	A rendszer be van kapcsolva
	Stimulációs hullám látható	A rendszer járás/edzés módban van, a stimuláció engedélyezve van, de ki van kapcsolva
	Villogó stimulációs hullám	A rendszer járás/edzés módban van, a stimuláció engedélyezve van és be van kapcsolva
	0 és 9 közötti érték	Intenzitásszint
	Járási ikon megjelenítése	Járási mód engedélyezve
	Edzési ikon megjelenítése	Edzési mód engedélyezve
	Hangi ikon megjelenítése	Hang bekapcsolva

*Opcionális komponens

A rendszer hibajelzései

	E 14 Hibás elektrodaérintkezés Ellenőrizze, hogy az elektródák a helyükre pattantak-e, az EPG pedig teljesen a tartójában van-e. Az EPG + vagy - gombja segítségével törölheti a hibaüzenetet.
	Az akkumulátor alacsony töltöttségének jelzése az EPG-n. Töltse fel a rendszert.
	Az EPG meghibásodott. Nyomja meg, majd 30 másodpercig tartsa lenyomva a ⏻ gombot, majd kapcsolja be a készüléket, vagy vegye fel a kapcsolatot a műszaki ügyfélszolgálattal.

Az ellenjavallatok, figyelmeztetések, mellékhatások, óvintézkedések és kezelési utasítások teljes listáját a Használati útmutatóban találja.

©2022 Bioness Inc.

Az L300 Go®, a Bioness, a Bioness logó® és a LiveOn® a Bioness Inc. védjegyei az Egyesült Államokban vagy más országokban. | www.bioness.com