




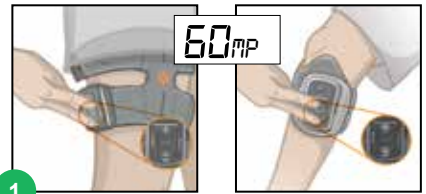

## Komponensek párosítása

**FONTOS: Még azelőtt párosítsa a komponenseket egymáshoz, mielőtt a Clinician alkalmazáshoz párosítaná őket.**

- 1 Combandzsetta alsó mandzsettával.  
**EPG-párosítás mód aktiválása:** Nyomja le egyszerre az EPG-egységek plusz és mínusz gombját. Az EPG-állapotjelző fénye zöld, sárga, piros színnel kezd villogni.
- 2 Szükség esetén párosítsa a lábérzékelőt az alsó mandzsetta EPG-egységéhez.  
**A lábérzékelő párosítási módjának aktiválása:** A lábérzékelő új EPG-hez történő párosításához helyezzen egy gomelemet (CR2032) a lábérzékelőbe, majd nyomja meg a nyomásérzékelőt. A párosítási mód aktiválását zölden villogó fény jelzi. Állítsa az alsó EPG-t párosítás üzemmódba.



## A rendszer párosítása a Bioness klinikai programozási alkalmazással

- 1 Jelentkezzen be a Bioness klinikai programozási alkalmazásba
- 2 A párosítás képernyő megnyitásához válassza a  elemet. Az EPG-egység plusz és mínusz gombjának egyidejű megnyomásával állítsa a rendszert párosítás módba. Válassza a kívánt láb felett található  **Párosítás ikont**. A párosítást követően a következő gombra kattintva zárja be a párosítás képernyőt: .
- 3 Válasszon egy pácienset: **Munkavégzés meglévő pácienssel, Új létrehozása vagy Kiválasztás listáról.** Ha a pácienslistából választ, nyomja meg a  **Feltöltés ikont** vagy kattintson duplán a kijelölt névre.



## Az L300 Go rendszer felhelyezése

- 1 Helyezze fel a személyre szabott panelt.
- 2 Csúsztassa rá a személyre szabott szíjburkolatot a mandzsetta szíjára.
- 3 Egy nedves, puha ruhával törölje át a stimulációs területet. Ezt követően kissé tolja előre a lábszárat.
- 4 Miután az elektródá(ka)t csatlakoztatta az L300 mandzsettához, a mandzsetta-patellapozicionálós és a rögzítőszíj segítségével helyezze fel a mandzsettát a lábra, majd állítsa be a megszorítás mértékét.
- 5 A kívánt eredmény elérése érdekében konfigurálja a stimulációs programok beállításait.



Az ellenjavallatok, figyelmeztetések, mellékhatások, óvintézkedések és kezelési utasítások teljes listáját a Használati útmutatóban találja.

Az L300 Go®, a Bioness, a Bioness logó® és a LiveOn® a Bioness Inc. védjegyei az Egyesült Államokban vagy más országokban. | [www.bioness.com](http://www.bioness.com)

## Az L300 Go Thigh Stand-Alone felhelyezése

- 1 Nedvesítse meg a combi szövetelektrodákat, majd pattintsa rá őket a mandzsettára.
- 2 Egy nedves, puha ruhával törölje át a stimulációs területet. Úgy helyezze fel a mandzsettát a combra, hogy legfeljebb három ujjnyi távolságra legyen a térdhajlattól (a térdínon történő alkalmazás esetén) vagy a patellától (a négyfejű combizmon történő alkalmazás esetén).
- 3 Igazítsa a mandzsettát a comb középvonalához. Rögzítse a szíjakat.
- 4 A kívánt eredmény elérése érdekében a páciens ülő helyzetében konfigurálja a stimulációs beállításokat.
- 5 Szükség esetén álló helyzetben módosítsa a stimulációs beállításokat.



## Az L300 Go rendszer programozása

- 1  **A stimulációs beállítások konfigurálása** Válassza ki a kívánt EPG-egységet a **stimulációs szabályozó irányítópultról**. Válassza ki az elektróda típusát (a képen az irányítási elektróda képernyője látható). Miközben a páciens ülő helyzetben van, a  **Teszt** gomb megnyomásával kapcsolja be a stimulációt a választott EPG-egységen. A kívánt eredmény elérése érdekében módosítsa a beállításokat. A stimuláció leállításához nyomja meg a  **Teszt** gombot. Ismételje meg a lépést minden csatlakoztatott EPG esetén.
- 2  **Járás beállítások konfigurálása.** Nyomja meg a **Járás képernyő ikonját**. A járás üzemmód engedélyezéséhez nyomja meg a  **Stim hullám ikonját**. Figyelje meg a páciens járását, szükség esetén pedig módosítson a beállításokon. A stimuláció leállításához nyomja meg a  **Stim hullám ikonját**.
- 3  **Az edzési beállítások konfigurálása.** Nyomja meg az  **Edzés képernyő ikonját**. Módosítsa az edzési beállításokat, szükség szerint hagyjon ki egyes EPG-egységeket. A stimuláció minden párosított eszközön történő bekapcsolásához (a képzési módban lévő eszközöket is ideértve) válassza az **Edzés ikont**. A stimuláció leállításához nyomja meg az  **Edzés ikonját**.
- 4 Az egyes foglalkozásokat követően a  **Párosítás** képernyőn található  **Párosítás megszüntetése** elemre kattintva válassza le a rendszert. Zárja be a Clinician alkalmazást.  
*Megjegyzés: A stimuláció minden párosított és aktív eszközön történő aktiválásához nyomja meg, majd tartsa lenyomva a  **Manuális stimuláció ikont**. A stimuláció addig aktív, amíg a gombot lenyomva tartja.*

