

## Nasazení funkčně stimulační manžety systému L300 Go

- 1 Posadte se a velmi mírně natáhněte dolní část nohy.
- 2 Nakloňte horní část manžety systému L300 Go směrem k sobě a posunujte ji nahoru po noze, dokud se lokátor pohodlně neumístí pod kolenní česku. Přitiskněte k noze i dolní část manžety systému L300 Go.
- 3 Přidržte manžetu systému L300 Go na místě pomocí palce nebo druhé ruky přitisknuté na pouzdro pro EPG. Vytáhněte rukojeť popruhu a omotejte jej okolo pouzdra.
- 4 Obrázek 4 znázorňuje správné umístění manžety systému L300 Go na pravé noze.



1



2









3



4

## Provoz systému L300 Go



- 1 Stisknutím tlačítka napájení  zapnete EPG.
- 2 Vybete režim chůze nebo režim tréninku:
  - Chcete-li vybrat režim chůze, stiskněte *krátce* tlačítko režimu .
  - Chcete-li vybrat režim tréninku, stiskněte a *podržte* tlačítko režimu  po dobu tří sekund. EPG potvrdí volbu nového režimu zvukovou a taktilní zpětnou vazbou.
  - Chcete-li ukončit režim tréninku, stiskněte a *podržte* tlačítko režimu  po dobu tří sekund.
- 3 V případě potřeby upravte úroveň intenzity stimulace pomocí tlačítek plus  nebo mínus .

## Nabíjení baterií

Připojte nabíjecí sadu systému k EPG a poté ji zapojte do zásuvky.



(blikání)	Světelná kontrolka stavu EPG bliká červeně a světelná kontrolka baterie bliká žlutě	Slabá baterie EPG
(blikání)	Bliká žlutě	Slabá baterie
(blikání)	Bliká zeleně	Nabíjení
	Svítil zeleně	Plně nabitá

## Displeje EPG



(blikání)	Bliká zeleně	System je zapnutý
(blikání)	Bliká zeleně	Stimulace je vypnutá
(blikání)	Bliká žlutě	Stimulace je zapnutá
(blikání)	Bliká červeně a je slyšet alarm	Aktivní chyba
	Svítil červeně	Porucha EPG

## Displeje řídicí jednotky\*



	Jednotlivá ikona	System je zapnutý
	Znázorněná vlna stimulace	System je v režimu chůze/tréninku, stimulace je povolena, ale vypnutá
	Blikající vlna stimulace	System je v režimu chůze/tréninku, stimulace je povolena a zapnutá
	Zobrazena čísla 0–9	Stupeň intenzity
	Zobrazena ikona chůze	Režim chůze je povolen
	Zobrazena ikona tréninku	Režim tréninku je povolen
	Zobrazena ikona zvuku	Zvuk je zapnutý

\*Volitelná komponenta

## Zobrazení chyb systému

(blikání)	Vadný kontakt elektrody. Ujistěte se, že jsou elektrody připnuty a EPG je zcela v pouzdře. Vymažte chybovou výstrahu stisknutím tlačítka  nebo  na EPG.
(blikání)	Kontrolka slabé baterie u EPG. Nabijte systém.
	Porucha EPG. Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 30 sekund. Poté jej opět zapněte nebo se obraťte na technickou podporu.

Úplný přehled všech kontraindikací, varování, nežádoucích reakcí, preventivních opatření a pokynů pro péči najdete v uživatelské příručce.

©2022 Bioness Inc.

L300 Go® Wireless, Bioness, logo společnosti Bioness® a LiveOn® jsou ochrannými známkami společnosti Bioness Inc. ve Spojených státech amerických nebo dalších zemích. | www.bioness.com