




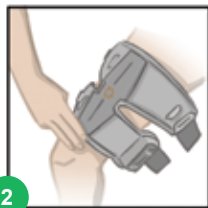



Zakładanie mankietu L300 Go na udo

- 1 Zmoczyć elektrody tekstylne na udo i przymocować je do mankietu L300 Go na udo.
- 2 W celu założenia mankietu na mięsień czworogłowy w pozycji siedzącej umieścić mankieta L300 Go na udzie, tak aby lokalizator znajdował się na wysokości trzech palców nad kolanem.
- 3 Mankiet L300 Go na udo należy umieścić w lokalizacji dopasowanej przez lekarza prowadzącego. Patrz rysunek 3.
- 4 W celu założenia mankietu na mięśnie tylnej grupy uda w pozycji siedzącej lub stojącej umieścić mankieta L300 Go na udzie na wysokości co najmniej czterech palców od tylnej strony kolana, bezpośrednio pod bruzdą pośladkową. Patrz rysunek 4.



Obsługa systemu L300 Go



- 1 Nacisnąć przycisk włączania/wyłączania , aby uruchomić generator EPG.
- 2 Wybrać tryb chodu lub tryb ćwiczeń:
 - Aby wybrać tryb chodu, nacisnąć *krótco* przycisk trybu .
 - Aby wybrać tryb ćwiczeń, nacisnąć i *przytrzymać* przycisk trybu  przez 3 sekundy. Generator EPG wygeneruje potwierdzenie włączenia nowego trybu w postaci sygnału dźwiękowego i dotykowego. Aby wyłączyć tryb ćwiczeń, nacisnąć i przytrzymać przycisk trybu  przez 3 sekundy.
- 3 W razie potrzeby dostosować poziom intensywności stymulacji, naciskając przycisk plus  lub minus .

Pełna lista wszystkich przeciwwskazań, ostrzeżeń, reakcji niepożądanych, środków ostrożności i instrukcji dotyczących pielęgnacji znajduje się w Podręczniku użytkownika.

Ładowanie akumulatorów

Podłączyć zestaw ładowarki systemu do generatora EPG, a następnie do gniazda ściennego.



	Pasek wskaźnika stanu generatora EPG miga na czerwono, a wskaźnik akumulatora miga na żółto	Niski poziom naładowania akumulatora generatora EPG
	Miga na żółto	Niski poziom naładowania akumulatora
	Miga na zielono	Ładowanie
	Świeci na zielono (światło ciągłe)	Akumulator w pełni naładowany

Wskaźniki wizualne wyświetlane na generatorze EPG



	Miga na zielono	System jest włączony
	Miga na zielono	Stymulacja jest wyłączona
	Miga na żółto	Stymulacja jest włączona
	Miga na czerwono; emisja dźwiękowego sygnału alarmowego	Aktywny błąd
	Świeci na czerwono (światło ciągłe)	Awaria generatora EPG

Wskaźniki wizualne wyświetlane na module sterowania*



	Ikona o jednolitym kolorze	System jest włączony
	Ikona impulsu stymulacyjnego	System pracuje w trybie chodu/ćwiczeń, stymulacja jest włączona, ale nieaktywna
	Migająca ikona impulsu stymulacyjnego	System pracuje w trybie chodu/ćwiczeń, stymulacja jest włączona i aktywna
	Cyfry 0–9	Poziom natężenia
	Ikona chodu	Tryb chodu jest włączony
	Ikona ćwiczeń	Tryb ćwiczeń jest włączony
	Ikona dźwięku	Dźwięk jest włączony

*Element opcjonalny

Wskaźniki wizualne błędów systemowych

	Błąd kontaktu z elektrodą. Upewnij się, że elektrody są zatrzaśnięte i że generator EPG jest całkowicie umieszczony w gnieździe. Ostrzeżenie o błędzie można usunąć, naciskając przycisk lub na generatorze EPG.	
	Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora na generatorze EPG. Należy naładować system.	Awaria generatora EPG. Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 30 sekund, a następnie włączyć zasilanie lub skontaktować się z działem wsparcia technicznego.