

Zakładanie mankietu do stymulacji funkcjonalnej L300 Go

- 1 W pozycji siedzącej lekko wysunąć gołeń do przodu.
- 2 Nachylić górną część mankietu L300 Go do siebie, a następnie przesunąć go po nodze w górę do momentu, aż lokalizator będzie dopasowany poniżej rzepki. Docisnąć dolną część mankietu L300 Go do nogi.
- 3 Przytrzymać mankiety L300 Go w miejscu, umieszczając kciuk lub drugą dłoń na uchwycie na generator EPG. Przeciągnąć sprzączkę paska wokół uchwytu.
- 4 Rysunek 4 przedstawia mankiety L300 Go prawidłowo założony na prawą nogę.



1



2









3



4

Obsługa systemu L300 Go



- 1 Nacisnąć przycisk włączania/wyłączania , aby uruchomić generator EPG.
- 2 Wybrać tryb chodu lub tryb ćwiczeń:
 - Aby wybrać tryb chodu, nacisnąć *krótco* przycisk trybu .
 - Aby wybrać tryb ćwiczeń, nacisnąć i *przytrzymać* przycisk trybu  przez 3 sekundy. Generator EPG wygeneruje potwierdzenie włączenia nowego trybu w postaci sygnału dźwiękowego i dotykowego. Aby wyłączyć tryb ćwiczeń, nacisnąć i przytrzymać przycisk trybu  przez 3 sekundy.
- 3 W razie potrzeby dostosować poziom intensywności stymulacji, naciskając przycisk plus  lub minus .



Ładowanie akumulatorów

Podłączyć zestaw ładowarki systemu do generatora EPG, a następnie do gniazda ściennego.



	Pasek wskaźnika stanu generatora EPG miga na czerwono, a wskaźnik akumulatora miga na żółto	Niski poziom naładowania akumulatora generatora EPG
	Miga na żółto	Niski poziom naładowania akumulatora
	Miga na zielono	Ładowanie
	Świeci na zielono (światło ciągle)	Akumulator w pełni naładowany

Wskaźniki wizualne wyświetlane na generatorze EPG



	Miga na zielono	System jest włączony
	Miga na zielono	Stymulacja jest wyłączona
	Miga na żółto	Stymulacja jest włączona
	Miga na czerwono; emisja dźwiękowego sygnału alarmowego	Aktywny błąd
	Świeci na czerwono (światło ciągle)	Awaria generatora EPG

Wskaźniki wizualne wyświetlane na module sterowania*



	Ikona o jednolitym kolorze	System jest włączony
	Ikona impulsu stymulacyjnego	System pracuje w trybie chodu/ćwiczeń, stymulacja jest włączona, ale nieaktywna
	Migająca ikona impulsu stymulacyjnego	System pracuje w trybie chodu/ćwiczeń, stymulacja jest włączona i aktywna
	Cyfry 0-9	Poziom natężenia
	Ikona chodu	Tryb chodu jest włączony
	Ikona ćwiczeń	Tryb ćwiczeń jest włączony
	Ikona dźwięku	Dźwięk jest włączony

*Element opcjonalny

Wskaźniki wizualne błędów systemowych

	Błąd kontaktu z elektrodą. Upewnić się, że elektrody są zatrzaśnięte i że generator EPG jest całkowicie umieszczony w uchwycie. Ostrzeżenie o błędzie można usunąć, naciskając przycisk lub na generatorze EPG.	
	Wskaznik niskiego poziomu naładowania akumulatora na generatorze EPG. Należy naładować system.	
		Awaria generatora EPG. Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 30 sekund, a następnie włączyć zasilanie lub skontaktować się z działem wsparcia technicznego.

Pełna lista wszystkich przeciwwskazań, ostrzeżeń, reakcji niepożądanych, środków ostrożności i instrukcji dotyczących pielęgnacji znajduje się w Podręczniku użytkownika.

©2022 Bioness Inc.

L300 Go®, Bioness, logo Bioness® i LiveOn® to zastrzeżone znaki towarowe firmy Bioness Inc. w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. | www.bioness.com