




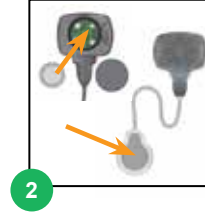

Bileşen Eşleştirme

ÖNEMLİ: Klinisyen Uygulamasıyla eşleştirmeden önce sistem bileşenlerini eşleştirin

- 1 Uyluk Manşeti ile Alt Manşeti.
EPG Eşleştirme Modunu Etkinleştirme: Her bir EPG'de Artı ve Eksi düğmelerine aynı anda basın. EPG durum göstergesi ışığı Yeşil, Sarı ve Kırmızı yanıp söner.
- 2 Gerekirse Ayak Sensörünü Alt Manşeti EPG'siyle eşleştirin.
Ayak Sensörü Eşleştirme Modunu Etkinleştirme: Ayak Sensörünü, Ayak Sensörüne pil yerleştirerek (CR2032) ve basınç sensörüne basarak yeni bir EPG ile eşleştirin; eşleştirme modunun etkinleştirildiğini onaylamak için yeşil ışık yanıp söner. Alt EPG'yi eşleştirme moduna alın.



Sistemin Bioness Klinisyen Programcısı Uygulamasıyla Eşleştirilmesi

- 1 Bioness Klinisyen Programcısı Uygulamasında Oturum Açın
- 2 Bağlantı ekranına erişmek için  seçimini yapın. EPG'de artı ve eksi düğmelerine aynı anda basarak Sistemi, Eşleştirme Moduna alın. İstenen bacağı yukarısında  **Bağlantı simgesini** seçin. Eşleştirdikten sonra, üzerine basarak bağlantı ekranından çıkın .
- 3 Bir hasta seçin: **Work with Existing patient (Mevcut Hastayla Çalış)**, **Create New (Yeni Oluştur)** veya **Choose from List (Listeden Seç)**. Hasta Listesinden seçim yapıyorsanız  **Yükle simgesine** basın veya seçilen ada çift tıklayın.



L300 Go Sisteminin Takılması

- 1 Kişisel paneli takın.
- 2 Kişisel şerit muhafazasını Manşet şeridi üzerine kaydırın.
- 3 Stimülasyon bölgesini nemli, yumuşak bir bezle silin. Ardından, alt bacağı hafifçe uzatın.
- 4 Elektrot/Elektrotlar L300 Manşetine bağlandıktan sonra, manşetin diz kapağı yer bulucusunu kullanarak manşeti bacağına yerleştirin, şeridi sabitleyin ve gerginliğini ayarlayın.
- 5 İstenen yanıtı alacak şekilde stimülasyon ayarlarını programlayın.



Tüm kontrendikasyonlar, uyarılar, advers reaksiyonlar, önlemler ve bakım talimatlarının tam listesi için, lütfen Kullanıcı Kılavuzunu inceleyin.












L300 Go[®], Bioness, Bioness Logo[®] ve LiveOn[®], Amerika Birleşik Devletleri veya diğer ülkelerde Bioness Inc. firmasının kayıtlı ticari markalarıdır. | www.bioness.com

L300 Go Thigh Stand-Alone Sisteminin Takılması

- 1 Uyluk kumaş elektrotlarını ıslatın ve manşete takın.
- 2 Stimülasyon bölgesini nemli, yumuşak bir bezle silin. Manşeti, diz arkası çukurunun (hamstring uygulaması) veya diz kapağının (kuadriseps uygulaması) en az üç parmak proksimalinde uyluğa yerleştirin.
- 3 Manşeti uyluğun orta çizgisine ortalayın. Şeritleri bağlayın.
- 4 İstenen yanıtı elde edecek şekilde hasta oturur durumdayken stimülasyon ayarlarını programlayın.
- 5 Gerekirse stimülasyon ayarlarını hasta ayaktayken yapın.



L300 Go Sisteminin Programlanması

- 1  **Stim Ayarlarını programlayın.** Stim Control Dashboard (Stim Kontrol Panosu) aracılığıyla istenen EPG'yi seçin. Elektrot tipini seçin (resimde Yönlendirme Elektrodu ekranı gösterilmektedir). Hasta oturur durumdayken seçili EPG'de stimülasyonu açmak için  **Test** düğmesine basın. İstenen yanıtı alacak şekilde ayarları yapın. Stimülasyonu durdurmak için  **Test** düğmesine basın. Tüm bağlı EPG'ler için bu adımı tekrarlayın.
- 2  **Yürüyüş Ayarlarını programlayın.** Yürüyüş Ekranı simgesine basın. Yürüyüş Modunu etkinleştirmek için  **Stim Dalgası simgesine** basın. Hastayı yürürken gözlemleyin ve gerektiği şekilde ayarları yapın. Stimülasyonu durdurmak için  **Stim Dalgası simgesine** basın.
- 3  **Egzersiz Ayarlarını programlayın.**  **Egzersiz Ekranı simgesine** basın. İstendiği şekilde belirli bir EPG'yi dışarıda bırakmak dahil egzersiz ayarlarını yapın. Egzersiz moduna dahil edilen tüm eşleştirilmiş cihazlarda stimülasyonu açmak için **Egzersiz simgesine** basın. Stimülasyonu durdurmak için  **Egzersiz simgesine** basın.
- 4 Her seansın sonunda,  Bağlantı Ekranına gidip  **Bağlantı Kesme simgesine** basarak sistem bağlantısını kesin. Klinisyen Uygulamasından çıkın.

Not: Düğme basılıyken tüm eşleştirilmiş ve aktif EPG'lerde stimülasyonu etkinleştirmek için  Manuel Stimülasyon simgesini basılı tutun.

