


Ladda H200 Wireless-systemet


Anslut systemets laddningsset till H200 Wireless-ortos och H200 Wireless-styrenhet samtidigt. Ladda H200 Wireless-systemet varje dag.

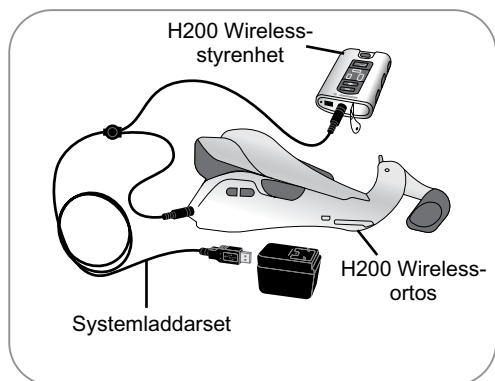

Styrenhetens laddningsdisplay		
	Blinkande gult	Låg batteriladdningsnivå
	Roterande grön cirkel	Laddning
	Vågrät grön linje	Fulladdad
Ortosens laddningsdisplay		
	Statuslampan blinkar gult	Låg batteriladdningsnivå
	Statuslampan blinkar gult och grönt	Laddning
	Statuslampan stadigt grönt	Fulladdad

Sätta på H200 Wireless-ortosen

- 1 Fukta och fäst tygelektrodena.
- 2 Placera ortosen på ett stabilt underlag och för in handen i spiraländen. Tenaren (med fastsittande elektrod) ska vila vid tumbasen.
- 3 Placera handledsbryggan bekvämt på handledens ovansida.
- 4 Placera underarmen i ortosens flexorstöd.
- 5 Stäng extensorvingen.
- 6 Fäst handledsremmen om det behövs.

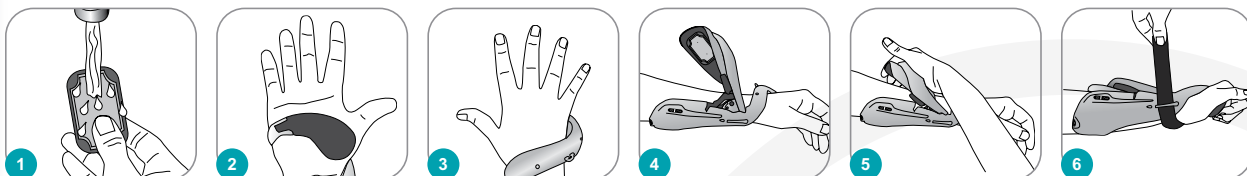








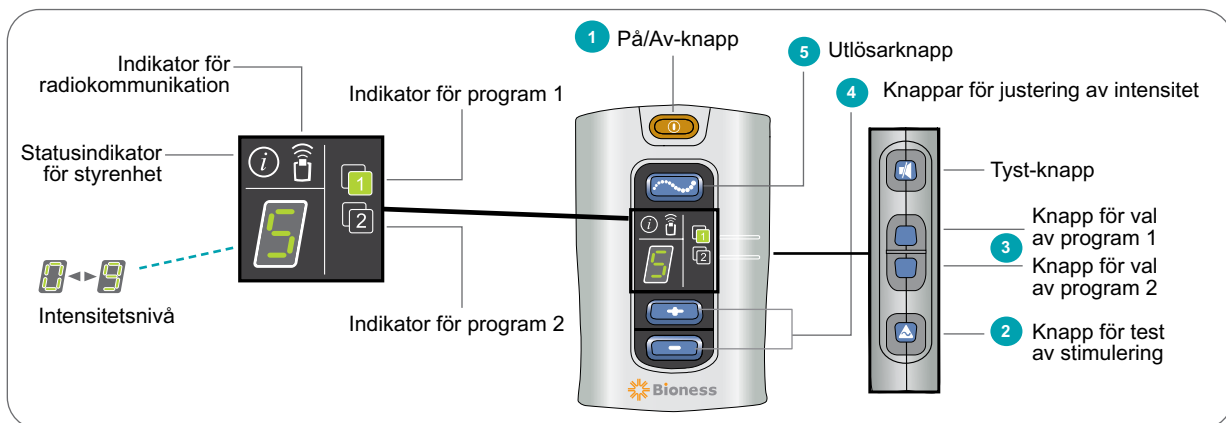

H200 Wireless-ortosdisplay

System på Statuslampa blinkar grönt	Stimuleringen är på Stimuleringslampan blinkar gult	Stimulering har pausats Stimuleringslampan lyser stadigt gult	Fel på elektrodkontakt Statuslampan blinkar rött	Maskinvaru-/ programvarufel, laddningsfel Statuslampan är ihållande röd










Använda H200 Wireless-systemet



- Slå på systemet.** Tryck på På/Av-knappen .
- Testa ortosens position.** Tryck och håll in testknappen för stimulering  en gång för att testa extensormusklerna. Släpp knappen och tryck sedan ned den igen för att testa flexormusklerna. Upprepa efter behov.
- Välj program 1 eller program 2.** Tryck på programväljarknappen för program 1 eller program 2 på sidan av styrenheten. Det valda programmets lampa lyser GRÖNT:  eller .
- Justera nivån på stimulansintensiteten vid behov.** Tryck på  plus- eller  minusknappen för att öka/minska stimulansintensiteten i ortosen.
- Starta ett program.** Tryck på styrenhetens utlösarknapp  eller utlösarknappen på ortosen för att påbörja stimuleringen. **Pausa/återuppta ett program** genom att trycka på styrenhetens utlösarknapp eller utlösarknappen på ortosen.
Obs! Neuroprotesprogram kan inte pausas. Om du trycker på utlösarknappen när stimulering pågår växlar programmet till nästa fas i programmet. **Tryck på På/Av-knappen**  om du vill avbryta stimuleringen.

H200 Wireless-styrenhetsdisplay

	På/Av-knappen blinkar grönt	Systemet är på
	Utlösarknappen blinkar snabbt i gult	Stimuleringen är på
	Utlösarknappen lyser stadigt gult	Stimulering har pausats
	Indikatorn för program 1 är grön	Program 1 valt
	Indikatorn för program 2 är grön	Program 2 valt
	Styrenhetens statusindikator lyser stadigt rött	Funktionsfel hos styrenheten: Laddningsfel, registreringsfel, programvarufel
	Indikatorn för radiokommunikation blinkar rött	Radiokommunikationsfel

En fullständig lista över alla kontraindikationer, varningar, biverkningar, försiktighetsåtgärder och skötselinstruktioner finns i användarhandboken.

 Bioness, Inc.

H200® Wireless, Bioness, Bioness®-logotypen och LiveOn® är registrerade varumärken som tillhör Bioness Inc. i USA eller i andra länder. | www.bioness.com