


Referenčná karta používateľa H200 WIRELESS®

Nabíjanie systému H200 Wireless


Pripojte súpravu nabíjačky systému súčasne k ortéze H200 Wireless a riadiacej jednotke H200 Wireless. Systém H200 Wireless nabíjajte každý deň.

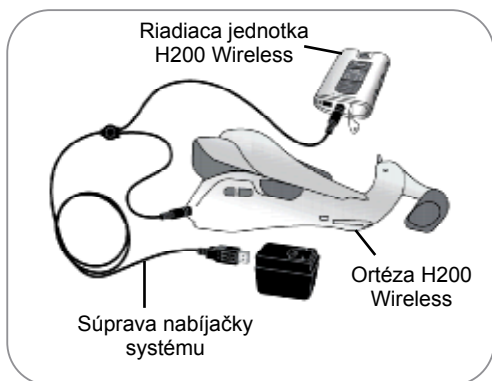

Indikátory nabíjania na riadiacej jednotke		
	Bliká nažltlo	Slabá batéria
	Otáčajúci sa zelený kruh	Nabíjanie
	Vodorovná zelená čiara	Úplné nabitie
Indikátory nabíjania na ortéze		
	Stavový indikátor bliká nažltlo	Slabá batéria
	Stavový indikátor bliká nažltlo a zeleno	Nabíjanie
	Stavový indikátor trvalo svieti nazeleno	Úplné nabitie

Nasadenie ortézy H200 Wireless

- 1 Navlhčite a nasadte látkové elektródy.
- 2 Umiestnite ortézu na stabilný podklad a vložte ruku do špirálového konca. Tenárna opora (s pripojenou elektródou) má spočívať na spodnej časti palca.
- 3 Zápästný mostík pohodlne umiestnite na zadnej strane zápästia.
- 4 Umiestnite predlaktie do opory ortézy pre flexory.
- 5 Zatvorte krídlo pre extenzory.
- 6 Ak je to potrebné, upevnite popruh na zápästie.

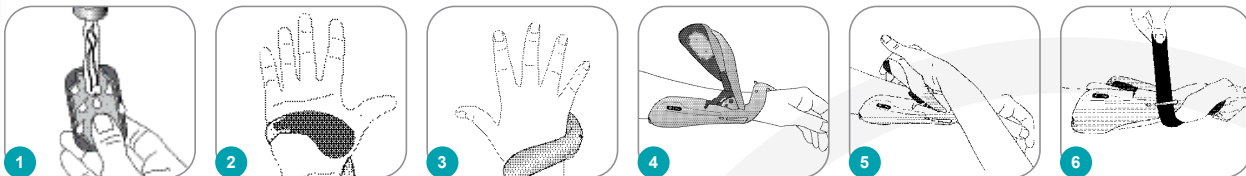

Signalizácia na ortéze H200 Wireless

Systém je zapnutý Indikátor stavu bliká na zeleno	Stimulácia je zapnutá Indikátor stimulácie bliká na žltlo	Stimulácia je pozastavená Indikátor stimulácie svieti na žltlo	Chybný kontakt elektródy Indikátor stavu bliká na červeno	Chyba hardvéru alebo softvéru; porucha nabíjania Indikátor stavu svieti načerveno



Bioness Inc.
25103 Rye Canyon Loop
Valencia, CA 91355
Tel.: 800.211.9136
E-mail: info@bioness.com
Webová lokalita: www.bioness.com




bioness®

A Bioventus Rehab Company

612-01060-001 Rev. C
01/2023

Ovládanie systému H200 Wireless

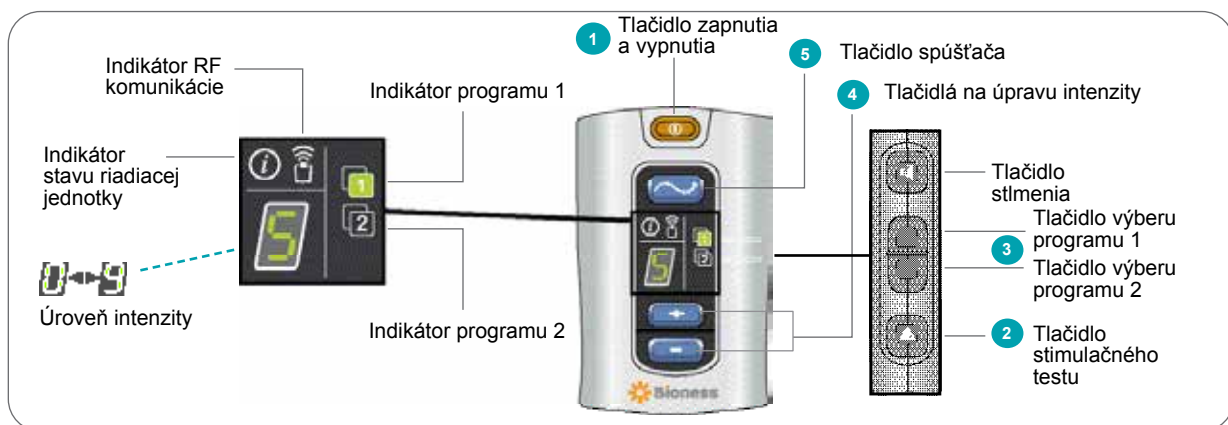

- Zapnite systém.** Stlačte tlačidlo vypínača.
- Otestujte polohu ortézy.** Jedným stlačením a podržaním tlačidla stimulačného testu otestujte vystieracie svaly (extenzory). Uvoľnite tlačidlo a potom jeho opätovným stlačením a podržaním otestujte ohýbacie svaly (flexory). Zopakujte postup podľa potreby.
- Vyberte program 1 alebo program 2.** Stlačte tlačidlo výberu programu 1 alebo programu 2 na boku riadiacej jednotky. Indikátor vybraného programu sa zobrazí na ZELENO: 1 alebo 2.
- V prípade potreby upravte úroveň intenzity stimulácie.** Stlačením tlačidla plus alebo mínus zvýšte/znížte intenzitu stimulácie pomocou ortézy.
- Spustite program.** Stlačením tlačidla spúšťača na riadiacej jednotke alebo tlačidla spúšťača na ortéze zapnete stimuláciu. **Ak chcete program pozastaviť/obnoviť,** stlačte tlačidlo spúšťača na riadiacej jednotke alebo tlačidlo spúšťača na ortéze.
Poznámka: Programy neuroprotézy nie je možné pozastaviť. Stlačením tlačidla spúšťača počas prebiehajúcej stimulácie sa spustí nasledujúca fáza programu.
Ak chcete stimuláciu vypnúť, stlačte tlačidlo vypínača .

Indikátory na riadiacej jednotke H200 Wireless

	Tlačidlo zapnutia a vypnutia bliká nazeleno	Systém je zapnutý
	Tlačidlo spúšťača rýchlo bliká nažltlo	Stimulácia je zapnutá
	Tlačidlo spúšťača svieti nepererušovane nažltlo	Stimulácia je pozastavená
	Indikátor programu 1 svieti nazeleno	Je vybraný program 1
	Indikátor programu 2 svieti nazeleno	Je vybraný program 2
	Indikátor stavu riadiacej jednotky svieti načerveno	Porucha riadiacej jednotky: chyba nabíjania; chyba registrácie; softvérová chyba
	Indikátor RF komunikácie bliká načerveno	Chyba RF komunikácie

Úplný zoznam všetkých kontraindikácií, výstrah, nežiaducich reakcií, upozornení a pokynov na poskytovanie starostlivosti nájdete v používateľskej príručke.

©2023 Bioness Inc.

H200® Wireless, Bioness, Bioness Logo® a LiveOn® sú ochranné známky spoločnosti Bioness Inc. v Spojených štátoch a iných krajinách. | www.bioness.com