


Nabíjení systému H200 Wireless



Připojte nabíječku systému současně k ortéze H200 Wireless a řídicí jednotce H200 Wireless. Nabíjejte systém H200 Wireless každý den.

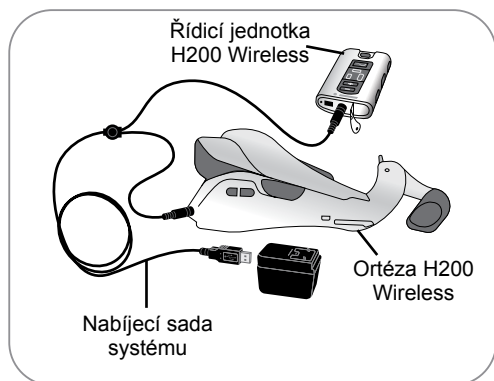

Indikátory nabíjení řídicí jednotky		
	Bliká žlutě	Slabá baterie
	Rotující zelený kroužek	Nabíjení
	Vodorovná zelená čárka	Plně nabitó
Indikátory nabíjení ortézy		
	Indikátor stavu bliká žlutě	Slabá baterie
	Indikátor stavu bliká střídavě žlutě a zeleně	Nabíjení
	Indikátor stavu svítí zeleně	Plně nabitó

Nasazení ortézy H200 Wireless


- 1 Namočte a připevněte textilní elektrody.
- 2 Umístěte ortézu na stabilní povrch a položte ruku do spirálového zakončení. Nástavec pro tenar (s připevněnou elektrodou) by měl spočívat na bázi palce.
- 3 Umístěte zápěstní můstek pohodlně na zadní stranu svého zápěstí.
- 4 Umístěte předloktí do opěrky ohýbače ortézy.
- 5 Zavřete křídlo natahovače.
- 6 Podle potřeby připevněte poutko na zápěstí.

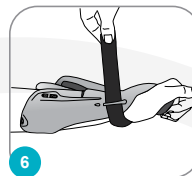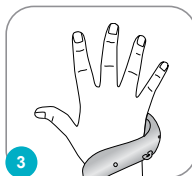







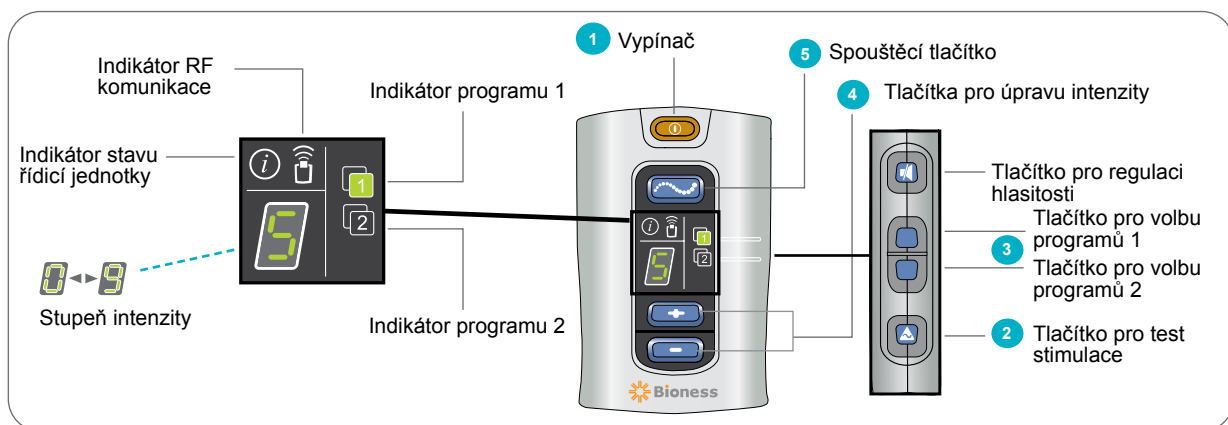

Indikátory stavu ortézy H200 Wireless








Systém je zapnutý Indikátor stavu bliká zeleně	Stimulace je zapnutá Indikátor stimulace bliká žlutě	Stimulace je pozastavena Indikátor stimulace svítí žlutě	Vadný kontakt elektrody Indikátor stavu bliká červeně	Chyba hardwaru/ softwaru; chyba nabíjení Indikátor stavu svítí červeně

Provoz systému H200 Wireless



- 1 **Zapněte systém.** Stiskněte vypínač .
- 2 **Vyzkoušejte polohu ortézy.** Stiskněte a podržte tlačítko pro test stimulace , abyste vyzkoušeli natahovač svalů. Uvolněte tlačítko a stiskněte a podržte jej znovu, abyste vyzkoušeli ohýbač svalů. Opakujte podle potřeby.
- 3 **Zvolte Program 1 nebo Program 2.** Stiskněte tlačítko pro volbu programu 1 nebo programu 2 na boční straně řídicí jednotky. Indikátor zvoleného programu bude svítit ZELENĚ:  nebo .
- 4 **Podle potřeby upravte stupeň intenzity stimulace.** Stiskněte tlačítko  nebo  pro zvýšení/snížení stupně stimulace na ortéze.
- 5 **Spusťte program.** Pro zapnutí stimulace stiskněte spouštěcí tlačítko  na řídicí jednotce nebo spouštěcí tlačítko na ortéze. **Pro pozastavení / opětovné zahájení stimulace** stiskněte spouštěcí tlačítko na řídicí jednotce nebo spouštěcí tlačítko na ortéze.
Poznámka: Programy neuroprotézy nelze pozastavit. Stisknutím spouštěcího tlačítka, když je stimulace zapnutá, spustíte následující fázi programu. **Pro vypnutí stimulace** stiskněte vypínač .

Indikátory stavu řídicí jednotky H200 Wireless

	Vypínač bliká zeleně	Systém je zapnutý
	Spouštěcí tlačítko rychle bliká žlutě	Stimulace je zapnutá
	Spouštěcí tlačítko svítí žlutě	Stimulace je pozastavena
	Indikátor programu 1 svítí zeleně	Zvolen program 1
	Indikátor programu 2 svítí zeleně	Zvolen program 2
	Indikátor stavu řídicí jednotky svítí červeně	Porucha řídicí jednotky: chyba nabíjení; chyba registrace; chyba softwaru
	Indikátor RF komunikace bliká červeně	Chyba RF komunikace

Úplný přehled všech kontraindikací, varování, nežádoucích reakcí, preventivních opatření a pokynů pro péči najdete v uživatelské příručce.

©2023 Bioness Inc.

H200® Wireless, Bioness, logo společnosti Bioness® a LiveOn® jsou ochrannými známkami společnosti Bioness Inc. ve Spojených státech amerických nebo dalších zemích. | www.bioness.com