


H200 Wireless -ortoosin asettaminen

- 1 Valitse sopiva ortoosikoko ja kiinnitä asianmukainen kämmenosa.
- 2 Kiinnitä asianmukainen ranneosa.
- 3 Aseta ortoosi paikoilleen ja tarkista, jääkö FPL-elektrodin nro 5 ja ranteen väliin rako. Jos väliin jää rako, kiinnitä ortoosiin rannehihna ja kiristä se.
- 4 Mikäli tämäkään ei poista rakoja, riisu ortoosi ja kiinnitä FPL-paneeli.
- 5 Valitse ja kiinnitä ojentajan asetuspaneeli, joka saa aikaan halutun käden/sormen liikkeen. Aloita asetuspaneelista A.
- 6 Valitse ja kiinnitä koukistajan asetuspaneeli, joka saa aikaan halutun käden/sormen liikkeen. Aloita asetuspaneelista A.
- 7 Kastele kaikki kangaselektrodit.
- 8 Kiinnitä kangaselektrodit elektrodialustoihin.
- 9 Aseta ortoosi paikoilleen.
- 10 Säädä stimulaatioparametrit.

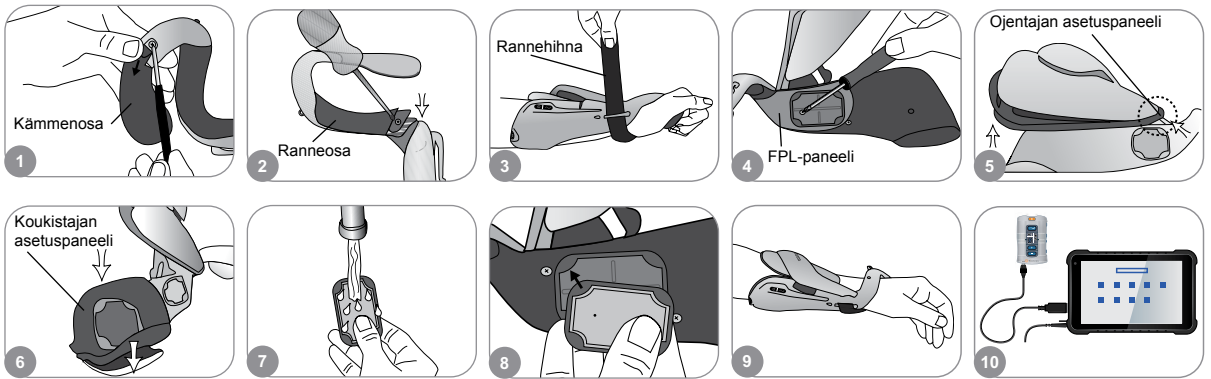

Stimulaatioparametrien säätäminen

- 1 Kirjautu H200 Wireless -ohjelmistoon. Valitse potilastietue ja paina Avaa-painiketta, tai luo uusi potilastietue valitsemalla Uusi.
- 2 Valitse Ohjelmat-valikosta Stimulaatioparametrit.
- 3 Säädä ojentajien ja koukistajien stimulaatioparametreja. Käynnistä stimulaatio painamalla Käynnistä-painiketta. Pysäytä stimulaatio painamalla Pysäytä-painiketta. Kytke tarvittaessa ortoosin käynnistyspainike pois käytöstä. Palaa Ohjelmat-valikkoon painamalla Takaisin-painiketta.



Täydellinen luettelo kaikista vasta-aiheista, varoituksista, haittavaikutuksista ja hoito-ohjeista on terveydenhuoltoalan ammattilaisen oppaassa.



H200® Wireless, Bioness, Bioness Logo® ja LiveOn® ovat Bioness Inc:n Yhdysvalloissa tai muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. | www.bioness.com

Ohjelma-asetusten säätäminen

- 1 Valitse Ohjelmat-valikosta Ohjelma-asetukset.
- 2 Valitse Ohjelma-asetukset-ikkunasta ohjelma. Ohjelmaikkuna avautuu näyttöön.
- 3 Kun käytät toiminnallista harjoitusohjelmaa tai neuromodulaatio-ohjelmaa, säädä ohjelma-asetukset ja käynnistä stimulaatio painamalla Käynnistä-painiketta. Sammuta stimulaatio painamalla Pysäytä-painiketta.
- 4 Kun käytät neuroproteesiohjelmaa, säädä ohjelma-asetukset ja käynnistä stimulaatio painamalla käynnistintä. Kun olet valmis, käynnistä ohjelman seuraava vaihe painamalla käynnistintä toisen kerran. Sammuta stimulaatio painamalla Pysäytä-painiketta.





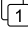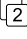

Käyttäjäohjelmien määrittäminen ohjauksyksikön painikkeisiin 1 ja 2

- 1 Valitse Ohjelmat-valikosta  Muokkaa tai  Muokkaa, jolloin Määritä painikkeeseen 1- tai Määritä painikkeeseen 2 -ikkuna aukeaa.
- 2 Valitse ohjelmaluettelosta ohjelma, muokkaa ohjelma-asetuksia painamalla Muokkaa-painiketta ja/tai määritä ohjelma valitsemalla Takaisin.
- 3 Kun haluat luoda ja määrittää henkilökohtaisen mukautusohjelman, valitse Henkilökohtainen mukautus ja paina Muokkaa-painiketta. Voit lisätä, poistaa, muokata ja/tai järjestää uudelleen ohjelman lohkoja tarpeen mukaan. Säädä lohkon kestoa ja kokonaiskestoa ja paina Takaisin-painiketta.



Hoitotilan käyttö

- 1 Sammuta H200 Wireless -ohjauksyksikkö. Paina ja *pidä alhaalla* miinuspainiketta . Paina *lyhyesti* virtapainiketta . Stimulaation voimakkuustaso ja ohjelman kirjain A näkyvät vuorotellen digitaalinäytössä.
- 2 Valitse hoito-ohjelmat A–G painamalla ohjauksyksikön sivussa olevia ohjelma-asetuspainikkeita.
- 3 Käynnistä/sammuta stimulaatio painamalla käynnistyspainiketta .
- 4 Poistu hoitotilasta painamalla virtapainiketta .

