


A H200 Wireless ortézis testreszabása

- 1 Válassza ki a megfelelő ortézisméretet, majd csatlakoztassa a megfelelő hüvelyk párnaegységet.
- 2 Csatlakoztassa a megfelelő csuklóbetétet.
- 3 Helyezze fel az ortézist, és ellenőrizze az FPL 5. elektróda és a csukló közötti érintkezést. Rés esetén csatlakoztassa az ortézis csuklópántját, majd húzza meg azt.
- 4 Ha a rés továbbra se szűnik meg, vegye le az ortézist, majd csatlakoztassa az FPL-panelt.
- 5 Válassza ki, majd csatlakoztassa a feszítőegység rögzítőpaneljét, amely a kívánt kéz-/ujjmozgás kiváltására szolgál. Első lépésként az A panelt szerelje fel.
- 6 Válassza ki, majd csatlakoztassa a hajlítóegység rögzítőpaneljét, amely a kívánt kéz-/ujjmozgás kiváltására szolgál. Első lépésként az A panelt szerelje fel.
- 7 Nedvesítse be az összes szövetelektrodát.
- 8 Csatlakoztassa a szövetelektrodákat az elektródacsatlakozókhoz.
- 9 Helyezze fel az ortézist.
- 10 Állítsa be a stimulációs paramétereket.

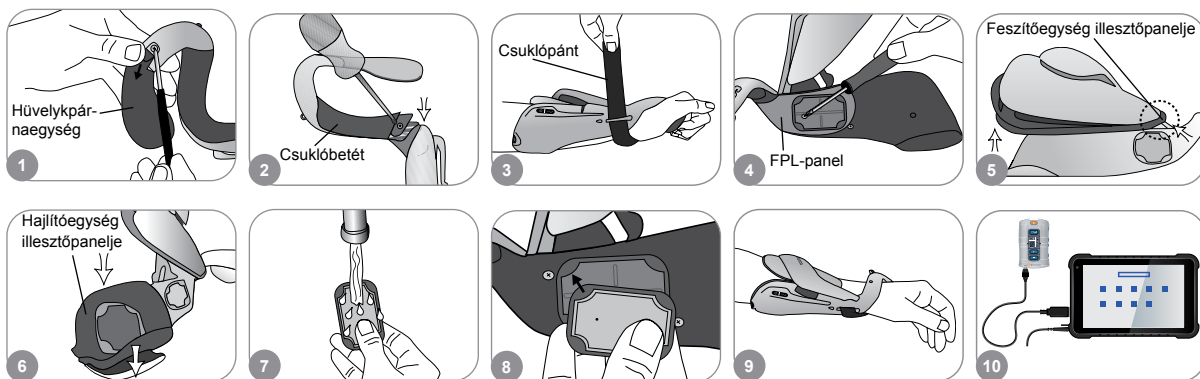

A stimulációs paraméterek beállítása

- 1 Jelentkezzen be a H200 Wireless szoftverbe. Válasszon ki egy páciens, majd nyomja meg a Megnyitás gombot, vagy új páciens létrehozásához nyomja meg az Új gombot.
- 2 A Programok menüben válassza a Stim. paraméterek elemet.
- 3 Állítsa be a feszítőegységek és a hajlítóegységek stimulációs paramétereit. A stimuláció indításához nyomja meg az Indítás gombot. A stimuláció leállításához nyomja meg a Leállítás gombot. Szükség esetén az ortézisen lévő indítógombot is kapcsolja ki. A Programok menübe való visszatéréshez nyomja meg a Vissza gombot.



Az ellenjavallatok, figyelmeztetések, mellékhatások, óvintézkedések és kezelési utasítások teljes listáját az Orvosi útmutatóban találja.

Programbeállítások módosítása

- 1 A Programok menüben válassza a Programbeállítások elemet.
- 2 A Programbeállítások ablakban válasszon egy programot. Ekkor megnyílik a program ablaka.
- 3 Funkcionális edzés és motoros neuromodulációs programok esetén adja meg a program kívánt beállításait, majd a stimuláció indításához nyomja meg az Indítás gombot. A stimuláció leállításához nyomja meg a Leállítás gombot.
- 4 Neuroprosthesis programok esetén állítsa be a program beállításait, majd a stimuláció indításához nyomja meg az indítógombot. Ha készen áll, az indítógomb ismételt megnyomásával aktiválhatja a program következő fázisát. A stimuláció leállításához nyomja meg a Leállítás gombot.







Felhasználói programok hozzárendelése a vezérlőegység 1. és 2. gombjához

- 1 A Hozzárendelés az 1. gombhoz vagy a Hozzárendelés a 2. gombhoz ablak megnyitásához a Programok menüben nyomja meg az 1 módosítása vagy a 2 módosítása gombot.
- 2 Válasszon egy programot a programlistáról, a programbeállítások módosításához nyomja meg a Szerkesztés gombot, és/vagy a program hozzárendeléséhez nyomja meg a Vissza gombot.
- 3 Egyéni személyes program létrehozásához és hozzárendeléséhez válassza az Egyéni személyes lehetőséget, majd nyomja meg a Szerkesztés gombot. Igény szerint adhat hozzá és törölhet programszegmenseket, illetve szerkesztheti és/vagy átrendezheti azokat. A szegmens vagy a teljes program időtartamát is módosíthatja. Ezt követően nyomja meg a Vissza gombot.



A klinikai mód használata

- 1 Kapcsolja ki a H200 Wireless vezérlőegységet. Nyomja meg, majd *tartsa lenyomva* a  Mínusz gombot. Röviden nyomja meg a  be-/kikapcsoló gombot. A digitális kijelzőn ekkor felváltva a stimuláció intenzitási szintje és az „A” program betűje jelenik meg.
- 2 Az A–G orvosi programok kiválasztásához használja a vezérlőegység oldalán található programválasztó gombokat.
- 3 A stimuláció be-/kikapcsolásához nyomja meg az  indítógombot.
- 4 A klinikai mód bezárásához nyomja meg a  be-/kikapcsoló gombot.

