


## Nasadenie ortézy H200 Wireless

- 1 Zvoľte vhodnú veľkosť ortézy a potom nasadte vhodnú tenárnu oporu.
- 2 Nasadte vhodnú zápästnú vložku.
- 3 Nasadte ortézu a skontrolujte vzájomnú polohu elektródy FPL č. 5 a zápästia. Ak je prítomná medzera, nasadte a utiahnite popruh ortézy na zápästie.
- 4 Ak je stále prítomná medzera, zložte ortézu a nasadte panel FPL.
- 5 Vyberte a nasadte upevňovací panel extenzorov, ktorý bude vyvolávať požadovaný pohyb ruky/prstov. Začnite upevňovacím panelom A.
- 6 Vyberte a nasadte upevňovací panel flexorov, ktorý bude vyvolávať požadovaný pohyb ruky/prstov. Začnite upevňovacím panelom A.
- 7 Navlhčite všetky látkové elektródy.
- 8 Upevnite látkové elektródy k podložkám elektród.
- 9 Nasadte ortézu.
- 10 Upravte stimulačné parametre.

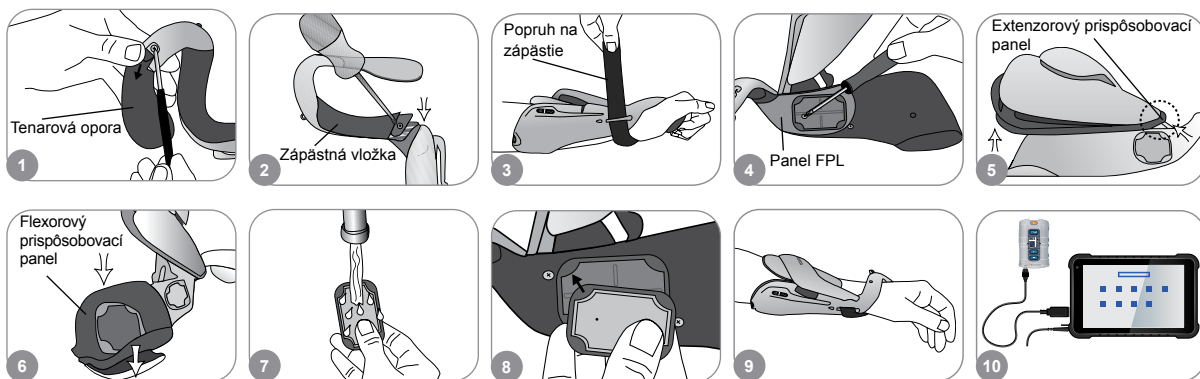

## Úprava parametrov stimulácie

- 1 Prihláste sa do softvéru H200 Wireless. Vyberte zápis pacienta a stlačte tlačidlo Otvoriť alebo vytvorte zápis pacienta stlačením tlačidla Nové.
- 2 V ponuke Programy stlačte tlačidlo Stimulačné parametre.
- 3 Upravte stimulačné parametre pre extenzory a flexory. Stlačením tlačidla Štart zapnete stimuláciu. Stlačením tlačidla Stop zastavte stimuláciu. V prípade potreby deaktivujte tlačidlo spúšťača na ortéze. Stlačením tlačidla Naspäť sa vrátite do ponuky Programy.




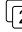
Úplný zoznam všetkých kontraindikácií, výstrah, nežiaducich reakcií, upozornení a pokynov na poskytovanie starostlivosti nájdete v príručke pre lekára.

# Úprava nastavení programu

- 1 V ponuke Programy stlačte tlačidlo Nastavenia programu.
- 2 V okne Nastavenia programu vyberte program. Otvorí sa okno programu.
- 3 Pre programy Funkčný tréning a Motorická neuromodulácia upravte nastavenia programu a stlačením tlačidla Štart zapnete stimuláciu. Stlačením tlačidla Stop vypnete stimuláciu.
- 4 Pre programy Neuroprotéza upravte nastavenia programu a stlačením spúšťača zapnete stimuláciu. Keď ste pripravení, stlačte spúšťač druhýkrát, čím sa spustí nasledujúca fáza programu. Stlačením tlačidla Stop vypnete stimuláciu.







# Priradenie používateľských programov tlačidlám 1 a 2 riadiacej jednotky

- 1 V ponuke Programy stlačením tlačidla Zmeniť  alebo Zmeniť  otvorte okno Priradiť k tlačidlu 1 alebo Priradiť k tlačidlu 2.
- 2 Zo zoznamu programov vyberte program, stlačením tlačidla Upraviť zmeňte nastavenia programu a/alebo stlačením tlačidla Naspäť priradiť program.
- 3 Ak chcete vytvoriť a priradiť osobný vlastný program, vyberte možnosť Osobné vlastné a stlačte tlačidlo Upraviť. Podľa potreby pridajte, odstráňte, upravte a/alebo zmeňte poradie segmentov programu. Upravte trvanie segmentov a celkové trvanie a potom stlačte tlačidlo Naspäť.



# Používanie klinického režimu

- 1 Vypnutie riadiacej jednotky H200 Wireless. Stlačte a **podržte** tlačidlo mínus . **Krátko** stlačte tlačidlo vypínača . Na digitálnom displeji sa bude striedavo zobrazovať úroveň intenzity stimulácie a písmeno programu „A“.
- 2 Stlačením tlačidiel na výber programu na boku riadiacej jednotky vyberte klinické programy A – G.
- 3 Stlačením tlačidla spúšťača  zapnete/vypnete stimuláciu.
- 4 Stlačením tlačidla vypínača  ukončíte klinický režim.

