


## Dopasowywanie ortozy H200 Wireless

- 1 Wybrać odpowiedni rozmiar ortozy, a następnie przymocować odpowiedni pasek na kłęb kciuka.
- 2 Przymocować odpowiednią nakładkę na nadgarstek.
- 3 Założyć ortezę i sprawdzić przestrzeń pomiędzy elektrodą zginacza nr 5 a nadgarstkiem. Jeśli wyczuwalna jest luka, przymocować i ciaśniej zapiąć pasek na nadgarstek.
- 4 Jeśli luka nadal się utrzymuje, zdjąć ortezę i przymocować panel zginacza.
- 5 Wybrać i przymocować panel dopasowania prostownika, który wywoła żądany ruch ręki/palca. Zacząć od dopasowania panelu A.
- 6 Wybrać i przymocować panel dopasowania zginacza, który wywoła żądany ruch ręki/palca. Zacząć od dopasowania panelu A.
- 7 Zmoczyć wszystkie elektrody tekstylne.
- 8 Zamocować elektrody tekstylne do podstaw elektrod.
- 9 Założyć ortezę.
- 10 Dostosować parametry stymulacji.

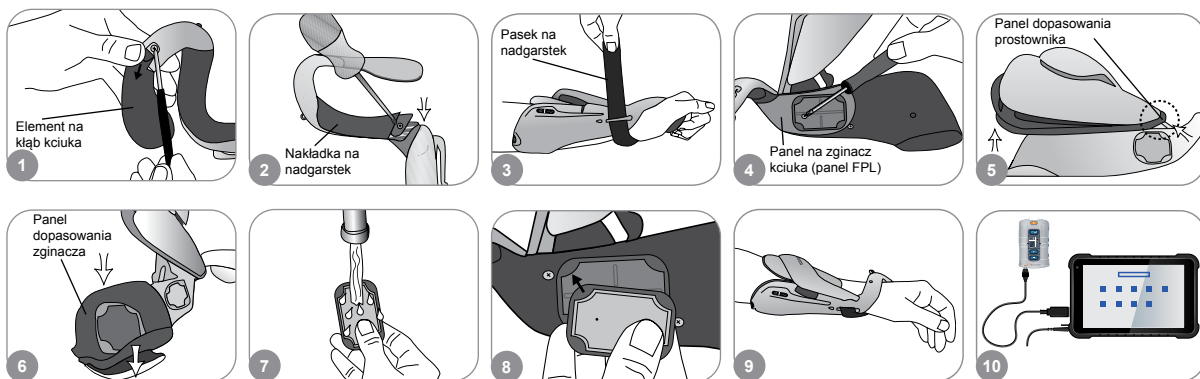

## Dostosowanie parametrów stymulacji


- 1 Zalogować się do oprogramowania H200 Wireless. Wybrać rekord pacjenta i nacisnąć przycisk Otwórz lub Nowy, aby utworzyć rekord pacjenta.
- 2 W menu Programy wybrać Parametry stym.
- 3 Dostosować parametry stymulacji prostowników i zginaczy. Nacisnąć Rozpocznij, aby włączyć stymulację. Nacisnąć Zatrzymaj, aby zatrzymać stymulację. Dezaktywować przycisk wyzwalacza na ortezie, jeśli to konieczne. Nacisnąć Wstecz, aby wrócić do menu Programy.



Pełna lista wszystkich przeciwwskazań, ostrzeżeń, reakcji niepożądanych, środków ostrożności i instrukcji dotyczących pielęgnacji znajduje się w Podręczniku dla lekarza.

## Dostosowanie ustawień programu

- 1 W menu Programy nacisnąć Ustawienia programu.
- 2 W oknie ustawień programu wybrać program. Otworzy się okno programu.
- 3 Dla programów Trening funkcjonalny oraz Neuromodulacja motoryczna dostosować ustawienia programu i nacisnąć Rozpocznij, aby rozpocząć stymulację. Nacisnąć Zatrzymaj, aby zakończyć stymulację.
- 4 Dla programów Neuroproteza dostosować ustawienia programu i nacisnąć przycisk Wyzwól, aby włączyć stymulację. Po raz drugi nacisnąć przycisk Wyzwól, aby rozpocząć następną fazę programu. Nacisnąć Zatrzymaj, aby zakończyć stymulację.

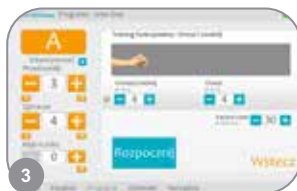

## Przypisywanie programów użytkownika do przycisków modułu sterowania 1 i 2

- 1 W menu Programy nacisnąć Modyfikuj lub Modyfikuj, aby otworzyć okno Przypisz do przycisku 1 lub Przypisz do przycisku 2.
- 2 Segmenty programu można dodawać, usuwać, edytować i zmieniać ich kolejność według potrzeb.
- 3 Aby stworzyć i przypisać Własny program niestandardowy, wybrać Własny niestandardowy i nacisnąć Edytuj. Kolejność segmentów programu można dodawać, usuwać, edytować i zmieniać według potrzeb. Dostosować czas trwania segmentu i całkowity czas trwania, a następnie nacisnąć Wstecz.



## Korzystanie z trybu klinicznego

- 1 Wyłączyć moduł sterowania H200 Wireless. Nacisnąć i *przytrzymać* przycisk minus . Krótko nacisnąć przycisk włączania/wyłączania . Poziom intensywności stymulacji i litera programu „A” będą wyświetlane naprzemiennie na wyświetlaczu cyfrowym.
- 2 Nacisnąć przyciski wyboru programów z boku modułu sterowania, aby wybrać programy kliniczne A–G.
- 3 Nacisnąć przycisk Wyzwól , aby włączyć/wyłączyć stymulację.
- 4 Nacisnąć przycisk włączania/wyłączania , aby wyjść z trybu klinicznego.

